

根管治療用口腔内ミラー

【禁忌・禁止】

破折・破損等の原因になるため、改造等を行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状：



装着時：



実際の使用では
ラバーダムシートを
装着すること

材質：ステンレス鋼製

種類：根管治療用口腔内ミラー（1種類）

【使用目的又は効果】

ラバーダムクランプ使用時にクランプ連結部位（弓部）に遠心から挟み込み根管内診査に使用する器具である。


【使用方法等】

【使用方法】


- 本品は、ラバーダムクランプ使用時にクランプ連結部位（弓部）に遠心から挟み込み根管内診査に使用する。

〔操作方法に関連する操作上の注意〕

- 1) 使用前に洗浄・滅菌してから使用すること。
- 2) 本品は患者毎に取り換えて使用すること。
- 3) 口腔外で本品をラバーダムクランプに試適し、装着可能なことを確認する。（クランプ連結部位（弓部）に挟み込んだ時に著しくゆるみ等が生じる場合、直ちに使用を中止すること。）
- 4) 通法に従い、ラバーダムシート及びラバーダムクランプを取り付ける。
- 5) 誤飲防止のため、本品にフロスを結紮（A, B）する。

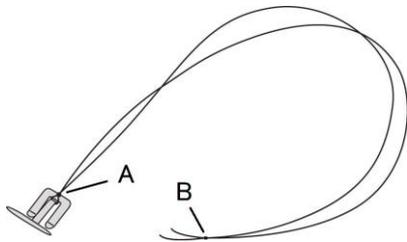

- 6) 口腔内にてクランプ連結部位（弓部）に遠心から挟み込む。

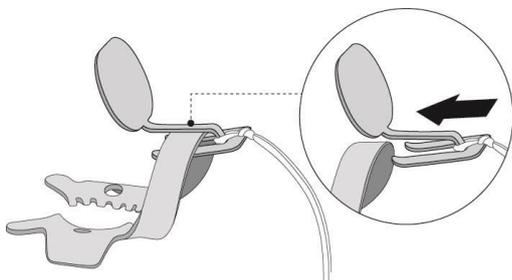

【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ず製品及び包装の点検、洗浄・滅菌（【保守・点検に係る事項】参照）をし、異常が確認された場合使用しないこと。
- 2) 折損、破損等の原因となるので、本品に対する曲げ・切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）は絶対に行わないこと。
- 3) 破折等の原因となるため、強い衝撃を与えないよう丁寧に扱うこと。
- 4) 血液、生理食塩水と長時間接触させたままにしないこと。
- 5) 使用後は、器具に付着している薬品等が乾燥しないうちに直ちに洗浄液等に浸し、除去すること。
- 6) 洗浄装置（超音波洗浄器等）で洗浄するときには、洗浄物どうしが接触して破損することがないように注意すること。
- 7) 洗浄後、器具についた水分を除去し十分乾燥させてから滅菌パック等に入れオートクレーブ滅菌すること。
- 8) 長期の使用により金属疲労や摩耗等の劣化が生じるので、適宜交換すること。
- 9) 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- 10) 廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。
- 11) アレルギーが認められる方には使用しないこと。
- 12) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 1) 本品は、高温、低温、多湿、直射日光、火気、水分（水漏れ）、オゾン、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避け、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- 2) 滅菌済みのものを貯蔵・保管する際、汚染を防ぐため清潔な場所に保管するとともに、有効保管期間の管理をすること。
- 3) 「もらいさび」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。
- 4) 接触腐食を防ぐため、材質の異なる金属製器具どうしは保管時に接触させないこと。
- 5) 本品は、歯科の従事者以外には触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前・使用後に破損、ヒビ、傷、変色、腐食等の異常がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
- 2) 金属たわし、クレンザー（磨き粉）などは器具の表面を損傷するので汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。
- 3) 洗浄または消毒する際は、感染予防のためゴム手袋、保護メガネ、マスク等を着用すること。
- 4) 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
- 5) 塩素系、ヨウ素系、強アルカリ性、強酸性の洗剤や消毒剤は、腐食の原因になるので使用を避けること。使用中に付着したときには水洗いすること。
- 6) 接触腐食を防ぐため、材質の異なる金属製器具どうしは洗浄時及び滅菌時に接触させないこと。

- 7) 洗剤の残留がないよう十分にすすぎを行うこと。仕上げすすぎには、浄化水（濾過、蒸留、脱イオン化等）を用いること。
- 8) 腐食、変色、シミ等を防ぐため、保管期間の長短にかかわらず洗浄した後は直ちに乾燥すること。
- 9) 滅菌する場合、高圧蒸気滅菌（各医療機関により検証され確認された滅菌条件による。）をすること。
- 10) セットまたは包装は、関連機材の仕様を熟知して行うこと。
- 11) 本品の品質を損なう恐れがあるので、滅菌時 180℃を超えて加熱しないこと。
- 12) 完全に乾燥していることを確認してから保管（【保管方法及び有効期間等】参照）すること。

【包装】

- 3 個入ケース包装

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者 : 株式会社背戸製作所
住 所 : 〒300-4223 茨城県つくば市小田 4596-1
電 話 番 号 : 029-867-0376
F A X 番 号 : 029-867-0439

【販売業者の氏名又は名称等】

販 売 業 者 : フィード株式会社
住 所 : 〒220-6119
神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-3-3
クイーンズタワーB 19F
電 話 番 号 : 0120-004-502