

2014 年 1 月 28 日作成（新様式第 1 版）

2016 年 5 月改訂

*2021 年 7 月改訂

届出番号：08B3X10007000152 号

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ JMDN35768000

H&ATI ポストブラシ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

破折・破損等の原因になるため、改造等は行わないこと。

【形状・構造及び原理等】



軸部形状：コントラハンドピース用

原材料：デュボンナイロン製：ブラシ
真鍮（メッキ処理）製：CA 部

種類：H&ATI ポストブラシ（φ2-7.5mm）

【使用目的又は効果】

歯の清掃・研磨及び根管の清掃に用いる回転式歯科用器具である。

【使用方法等】

本品は、歯の清掃・研磨及び根管清掃、インプラント清掃等に使用する。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

○単回使用

○使用前に必ずハンドピース（タービン）メーカーの指示に従い、シャックを奥まで挿入し半チャックでないことを確認すること。

○予め患者の口腔外で回転させ、ぶれがないことを確認すること。

【使用上の注意】

①使用目的以外は使用しないこと。

②使用前に必ず、〔保守・点検に係る事項〕を参照すること。

③ハンドピースに確実に装着し、低速（* 800rpm 以下）、正回転で使用する。

④高速、逆回転での使用は破損してけがをする恐れがあるため避けること。

⑤根管内にしっかり挿入されたのを確認後、低速、正回転で使用する。

⑥アレルギーが認められる方には使用しないこと。

⑦本品は、患者毎に取り替えて使用すること。

⑧歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

○汚れ等が付着したまま保管しないこと。

○歯科医療従事者以外は触れないよう、適切に保管し管理すること。

〔有効期間等〕

○本品は使用有効期限を特別定めていないため長時間使用により、材質の疲労・摩耗等で耐久性が低下することが有るため適宜新しい物と交換すること。

○単回使用の為、再使用はしないこと。

【保守・点検に係る事項】

使用前に破損、ヒビ、傷、変色、腐食等の異常がないか点検すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【包装】

H&ATI ポストブラシ（φ2-7.5mm）12 入

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 背戸製作所

住 所：〒300-4223 茨城県つくば市小田 4596-1

電話番号：029-867-0376

FAX 番号：029-867-0439

製造業者：株式会社 背戸製作所

【販売業者の氏名又は名称等】

販売業者：サンデンタル株式会社

住 所：〒542-0081 大阪市中央区南船場 4-8-9

電話番号：06-6245-0950

FAX 番号：06-6245-7690