



NMD050003191000

添付文書管理番号： NMD-050

届出番号： 13B1X10120500001

* 2019年10月改訂（第3版）

* 2018年4月改訂（第2版）


機械器具(29) 電気手術器

一般医療機器 電気手術器用ケーブル及びスイッチ 70657000

NT 対極板ケーブル

【形状・構造及び原理等】

＜形状＞

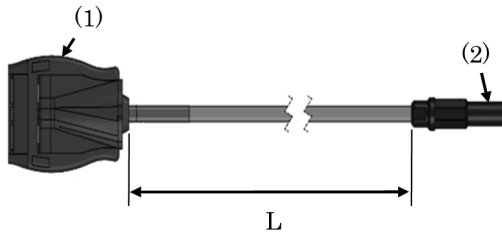

＜寸法(単位：mm)＞

L
2920

番号	名称	機能
(1)	対極板コネクタ	対極板と接続する。
(2)	ジェネレーターコネクタ	焼灼術用電気手術ユニット (ジェネレーター)と接続する。

＜作動・動作原理＞

高周波を用いた焼灼術において、本品を使用してジェネレーター及び対極板を接続する。

【使用目的又は効果】

本品は、高周波焼灼電源装置及び対極板を接続するために使用するケーブルである。

【使用方法等】

1. 対極板コネクタ部のレバーを開ける。
2. 対極板をスロットに完全に挿入する。
3. レバーを閉じる。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. プラグを抜くときは、ケーブルを持たずコネクタ部をもって抜くこと。
2. 本品を接続するジェネレーター及び対極板の取扱説明書を必ず参照すること。

＜不具合・有害事象＞

本品は使用に際し、以下のような不具合・有害事象が考えられる。

＜不具合＞

＜重大な不具合＞

1. 機器の破損及び動作不良
2. 発火
3. 放電

＜有害事象＞

＜重大な有害事象＞

1. 熱傷
2. 感電

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

1. 常温常湿にて保管すること。
2. 水のかからない場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

＜洗浄・保管＞

1. 使用後は湿らせた布で清拭して、必要に応じ血液等の汚れを落とし、乾燥させて保管すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

* 製造販売業者：アボットメディカルジャパン合同会社
03-6255-6370