


機械器具 48 注射筒
一般医療機器 注射筒キャップ（JMDNコード：37463000）
L I P O キャップ T P 1 0 3 C S

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止、再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

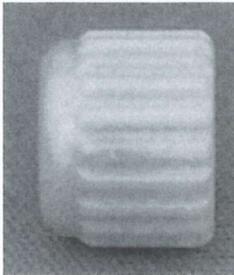

1. 体に接触する部分の組成
ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

1. 使用目的
注射筒内容物の漏れを防止し、内容物の無菌状態を注射筒を使用するまで維持する。

【使用方法等】

本品を無菌的に取り出し、注射筒先端に確実に接続して使用します。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 滅菌有効期限を確認の上、本品を使用すること。
- 本品に強い衝撃を与えないこと。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - (1) 取り扱い
 - 本品による弱酸性、アルカリ性液の取り扱いはしないこと。
 - 滅菌済み手袋等を着用して本品を取り扱うこと。[本品を素手などで持つと、検体が汚染される恐れがある。]

【保管方法及び有効期限】

1. 使用期限（滅菌有効期限）
使用期限は包装に記載 [自己認証による]
2. 貯蔵・保管
 - 直射日光を避け、高温多湿でない場所に保管すること。
 - 包装材料を傷付けないように注意の上、保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：セルソース株式会社
電話番号：03-6455-5308