

機械器具（39）医療用鉗子
一般医療機器 鉗子（JMDNコード10861001）


チェストケリー

【禁忌・禁止】

本製品を曲げ、切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）することは、傷や折損等の原因となるので絶対に行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 組成：SUS420（13クロムステンレス鋼）
2. 形状・構造
本製品は、回転軸のある2枚の先端（通常、ハンドルに親指と他の指用の穴がある）からなる。本製品は、再使用可能である。
（代表写真）

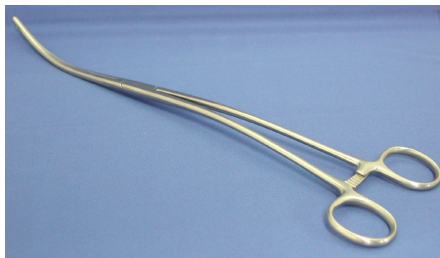

【使用目的又は効果】

本製品は、臓器、組織又は血管を非外傷性に把持、結合、圧迫又は支持する為に使用する。

【性能及び安全性に関する規格】

1. 本製品は、ハンドル部を操作することにより、臓器、組織又は血管を非外傷性に把持、結合、圧迫又は支持することを目的として設計された。
2. 本製品の出荷可否は、目視、手で触り検査を行い、表面に傷、金属などのバリやひっかかりが無いかの確認を行なう。

【使用方法】

使用前に必ず洗浄、滅菌を行うこと（EOG、高圧蒸気滅菌又は薬剤）。本製品は、把持する材料の上で2枚の先端を閉じることによって操作する。

【使用上の注意】

1. 本品の使用前に、変形や、傷がないか、器具が正常に作動することを確認すること。
2. 使用前に必ず洗浄・滅菌（保守・点検に係わる事項参照）をすること。
3. 使用後は付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
4. 電気メス先を本品に直接接触させて使用しないこと。（感電、火傷の原因になる）
5. 本品を粗雑に取扱わないこと。

【保管方法及び有効期間】

1. 常温、常湿で保管。
2. 洗浄後は必ず乾燥させること。
3. 有効期間の設定無し

【取扱い上の注意】

- （1）遠位部は鋭利なので触れないこと。
- （2）落下や衝撃で遠位部を傷つけたり、欠落させないこと。

【保守・点検に係る事項】

本品は日常点検し、正常に作動することを確認してください。正常なものだけを保管にまわすようにしてください。

1. 本品が漂白剤、消毒液等の塩素及びヨウ素を含む溶液に曝された場合は、直ちに清水で洗浄すること。
2. 洗浄後の本品は直ちに乾燥させ、湿った状態で必要以上に長時間放置しないこと。
3. 洗浄後に汚れが残った状態で滅菌、消毒を行うと錆等が生ずる原因となる。
4. 洗浄や滅菌に使用する水は、蒸留水や脱イオン水を使用すること。
5. 滅菌方法は高圧蒸気滅菌、EOG 又は薬剤のいずれでも可能。

【包装】

ポリエチレン袋入 1本

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

ソルブ株式会社

〒236-0051 神奈川県横浜市金沢区富岡東 2-2-2
横浜食用流通センタービル
問い合わせ先：045-773-7787

製造業者：アール・ケイ・ゼット サージカル

製造業者：AL-E-AHMED SURGICAL CO.