

バキュームベル

【警告】

- ・ 健全な皮膚に使用すること。
- ・ 皮膚疾患や創傷のある部位には使用しないこと。
- ・ 熟練した医師又はその指示の下で使用すること。

【禁忌・禁止】

- ・ 本品の加工、改造等は絶対に行わないこと。〔曲げ、切削、打刻(刻印)等の二次的加工は、故障、破損等の原因となる。〕
- ・ 本品には必要以上の力を加えないこと。
- ・ 本品は記載の用途以外の目的で使用しないこと。
- ・ 本品の使用により、健康被害の発生が想定される患者には使用しないこと。
- ・ 高圧蒸気滅菌は、吸引部及び観察部が変形する恐れがあるため行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は吸引源に接続して陰圧を発生させ、漏斗胸などに対して胸骨及び肋骨を持ち上げるために用いる。

2. 形状・構造

本製品の代表的な形状、構造は下記のとおりである



【使用目的又は効果】

本品は、治療時に吸引源に接続し、吸引を調節又は指示する器具で、再使用可能である。

【性能及び安全性に関する規格】

1. 外観: 本品にひび、凹み、汚れ等、使用上支障をきたすような異常がないこと。
2. 寸法: 本品の許容公差は±10%以内であること。

【使用方法】

1. 吸引器具に接続後、接続に問題がないか確認すること。
2. 吸引圧を調節しながら吸引する。
3. 使用後は適切な方法で保管すること (【保管方法及び有効期間】の項を参照)

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ・ 本品の使用目的及び使用方法を理解した医師又はその指示の下で使用すること。
- ・ 本品の使用前、使用中、使用後に破損、変形、傷、緩みや動作の異常等がないことを確認すること。これら異常が認められた場合はただちに使用を中止すること。
- ・ 破損、変形、傷、緩みの原因となるような過度の力を加えないこと。
- ・ 接続部がしっかりと接続されていることを確認してから吸引すること。
- ・ 高圧蒸気滅菌は、吸引部及び観察部が変形する恐れがあるため行わないこと。

2. 不具合・有害事象

(1) 不具合

- ・ 破損、変形、緩み

(2) 有害事象

- ・ 神経の損傷、麻痺
- ・ 過度の吸引による軟部組織や骨組織の損傷

【保管方法及び有効期間】

高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

【包装】 1個/箱

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者: ソルブ株式会社

神奈川県横浜市金沢区富岡東 2-2-2 横浜食用流通センタービル
問い合わせ先: 045-773-7787

製造業者: エッカートクローベ

Eckart Klobe

製造所所在国: ドイツ