

類別及び一般的名称: 医療用品(4) 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏 JMDNコード34864000

再使用禁止

販売名: ハイドロヒール


【禁忌・禁止】

再使用禁止

一度使用した製品は使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

本品は、フィルムとハイドロコロイドからなる粘着層による構造です。

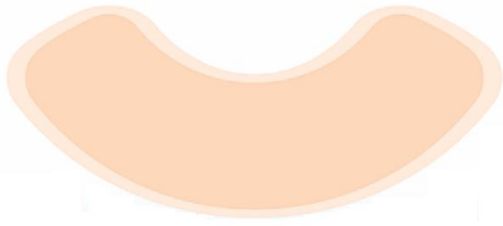

【使用目的又は効果】

傷等の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法】

1. 足首周囲の皮膚が清潔で乾燥していることを確認します。



2. タブ(つまみ)を用いて裏のフィルムを剥がします。



3. 足首の靴がこすれる部分にハイドロヒールを配置します。



4. ハイドロヒールを正しい位置に固定し滑らかにします。



【使用上の注意】

- ・本品使用中に発赤、びらん、そう痒等の皮膚障害と思われる症状が現れた場合は、本品の使用を中止し、適切な処置を行うこと。
- ・感染した傷には使用しないでください。また、傷が感染していると思われる場合は、使用を中止し、医師にご相談ください。
- ・一度使用ものを再度使用しないでください。
- ・皮膚刺激の発生原因になりますので、長時間貼り付けたり、急に剥がしたりしないでください。

【保管方法及び有効期間】

＜貯蔵・保管方法＞

- ・小児の手の届かないところに保管してください。
- ・水ぬれに注意し、多湿、直射日光を避け、風通しの良い清潔な場所に 27℃以下で保管。
- ・品質を保持するために、他の容器に入れ替えないで下さい。

【包装】

10枚／箱

1枚／袋

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者:

ソルブ株式会社

〒236-0051 神奈川県横浜市金沢区富岡東 2-2-2
横浜食用流通センタービル

問合せ先: 045-773-7787

製造業者: Salts Healthcare Ltd.

製造所所在国: 英国