

再使用禁止

販売名: ハイドロテープ

【禁忌・禁止】


再使用禁止

一度使用した製品は使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

本品は、フィルムとハイドロコロイドからなる粘着層による構造です。

特徴として好みの長さに調節し、使用することができます。

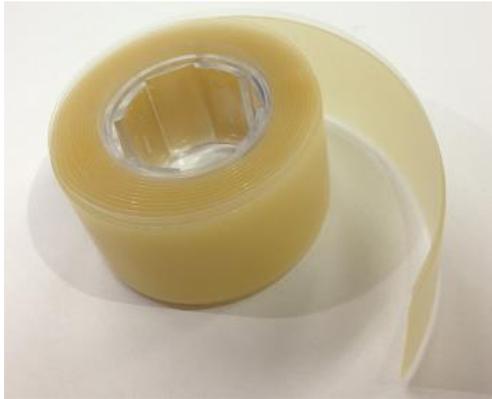

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者:

ソルブ株式会社

〒236-0051 神奈川県横浜市金沢区富岡東 2-2-2
横浜食用流通センタービル

問合せ先: 045-773-7787

製造業者: Salts Healthcare Ltd.

製造所所在国: 英国

【使用目的又は効果】

傷等の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法】

1. お好みのサイズに、ハサミ等を用い切断します。
2. 貼り付ける皮膚が清潔で乾燥していることを確認します。
3. タブ(つまみ)を用いて裏のフィルムを剥がします。
4. 被覆及び保護をしたい部分にハイドロテープを配置します。
5. ハイドロテープを正しい位置に固定し滑らかにします。

【使用上の注意】

- ・本品使用中に発赤、びらん、そう痒等の皮膚障害と思われる症状が現れた場合は、本品の使用を中止し、適切な処置を行うこと。
- ・感染した傷には使用しないでください。また、傷が感染していると思われる場合は、使用を中止し、医師にご相談ください。
- ・一度使用ものを再度使用しないでください。
- ・皮膚刺激の発生原因になりますので、長時間貼り付けたり、急に剥がしたりしないでください。

【保管方法及び有効期間】

＜貯蔵・保管方法＞

- ・小児の手の届かないところに保管してください。
- ・水ぬれに注意し、多湿、直射日光を避け、風通しの良い清潔な場所に27℃以下で保管。

【包装】

1巻／箱