

医療用品（03）手術用手袋及び指サック
自留指サック付きラテックスシートドレープ（JMDN コード：31978000）
一般医療機器

再使用禁止

アロム コット

【警告】

フックを過度に羊膜に突き刺さないこと。

【禁忌・禁止】


同製品を別の患者への使用は、感染の恐れがあるため使用禁止。
再使用禁止
再滅菌禁止
本来の用途以外の目的には使用しないこと

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は分娩を誘発、促進する手段として、人工的に羊膜を破ることを目的とした、指サックの先端にフックが付いているフック付き指サックである。本品はエチレンオキシドガス滅菌されたディスプレイザブル製品である。

{アロムコット全体図}

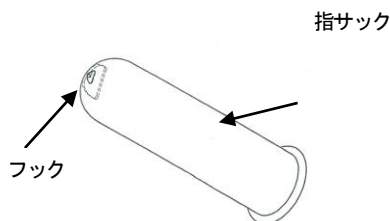

2. 寸法

全体サイズ		
	全 長	外 径
小	70mm	16.8mm
中	70mm	17.8mm

【原材料】 指サック：クロロプレン フック：ポリカーボネート

【使用目的又は効果】

本品は自留指サック付きの柔軟性のある材料を使用したカバーである。人工的に羊膜を破る際に使用する。

【使用方法】

- ・本品はディスプレイザブル製品であるので、1 回限りの使用のみで再使用できない。又、使用期限のきれたものは使用できない。
- ・無菌的操作で使用する。

<使用方法例>

- ①ゴム手袋を装着した人差し指または中指にアロムコットを指全体に指の付け根までしっかり被せる。
- ②フックが手のひら側に向いていることを確認して挿入する。

- ③フックと腔壁が接触しないように、ゆっくり腔内へ進めていく。
一般的にフックを二度上下に動かして破裂させる。

【保管方法及び有効期間】

1. 貯蔵・保管方法
直射日光を避け、乾燥した涼しい場所で保管すること。
2. 使用期間
使用期限：梱包日より 5 年間（個別包装ラベルに記載）

【使用上の注意】

- ・一度包装が開けられたものや、包装に穴のあいたものは、使用しないこと。
- ・開封前に包装が開封又は破損していないか、変形等異常がないか確認すること。
- ・熟練した医師、助産師以外の方は使用しないこと。

【包装】

小サイズ： 1 個/袋、 10 個/袋、 100 個/箱
中サイズ： 1 個/袋、 10 個/袋、 100 個/箱

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

- ・製造販売業者：ソルブ株式会社
神奈川県横浜市金沢区富岡東 2-2-2 横浜食用流通センタービル
問い合わせ先：045-773-7787
- ・製造業者：ユタメディカル プロダクツ インコーポレーション
(Utah Medical Products Ltd.)
国名：アメリカ合衆国