

医療用品 04 整形用品
 一般医療機器 一般的名称: 単回使用汎用サージカルドレープ (JMDNコード 35531000)

Jベール

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】


1. 原理

本品は患者に被せて使用することにより、患者と術者を隔離するためのドレープである。袋タイプと粘着剤を貼付し開口部に張り付けるタイプがある。

2. 形状・種類・材質

J VEIL (袋タイプ)

J VEIL CROSS
(シールタイプ)

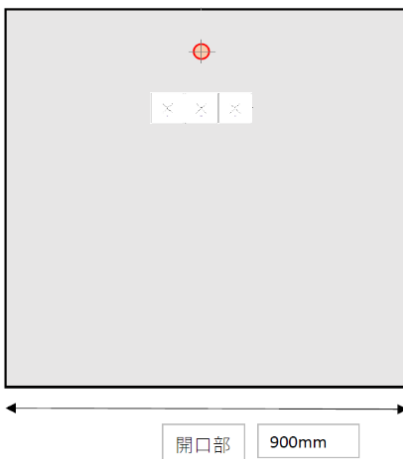

材質 袋: LDPE (低密度ポリエチレン)
 シール: PET (ポリエチレンテレフタレート)

【使用目的又は効果】

本品は患者に被せて使用し、保護的なカバーまたは障壁として用いる。

【使用方法等】

J VEIL (袋タイプ)

- ①本品を包装から取り出してください。
- ②フェイスシールド用のフレームやバイザーなどをした患者に被せてください。
- ③本品をクリップ等で固定してください。

J VEIL CROSS (シールタイプ)

- ①本品を包装から取り出してください。
- ②穴の開いたドレープなどに張り付けて使用してください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ・医師の管理下で使用し、窒息や異常な体温上昇に注意すること。
- ・本品の使用により、かぶれ等の皮膚障害が生じた場合、アレルギー反応を起こした場合には、直ちに本品の使用を中止し、適切な処置を行うこと。
- ・高温を発生する機器類に接しないように注意すること。
- ・本品は非滅菌製品のため、手術室の清潔区域での作業や、創傷部位などには使用しないこと。

2. 新品の器械を使用する前

- ・包装が破損又は汚損、水濡れしている場合は使用しないこと。

3. その他の注意

- ・本品に付着した飛沫などで周囲の環境を汚染しないよう注意して、使用済み製品を廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・水のかからない水平な場所で直射日光が照射しない場所に保管すること。
- ・気圧、温度、湿度、塩分や硫黄等を含んだ空気などにより、悪影響が生じる可能性がない場所に保管すること。
- ・化学薬品類の保管場所及び近接場所や腐食性ガスの発生するおそれのある場所、ホコリの多い場所に保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業

ENTFirst 第一医科株式会社

東京都文京区本郷2-27-16

TEL 03-3814-0111

FAX 03-3814-0135

製造業者

第一医科株式会社 技術センター