

機械器具 02 医療用照明器
一般医療機器 移動型診療用照明器
36843000

ホスピライト L1 スタンド

※ 数値は最大数値を表す。

【警告】

- ・ 至近距離で患者の目に向かって照射しないこと。

【禁忌・禁止】

- ・ 当社が指定した業者以外は、修理・設置を行わないこと。
- ・ 本品の使用前に、センターハンドルがきちんと固定されているか確認を行うこと。
- ・ 本品の改造は行わないこと。
- ・ 本品を清掃する際には、柔らかい布等で行い、アルコールや薬品等を使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

(1) ライトヘッド	
L1 ライトヘッド	
(2) スタンドポール	
スタンドポール	
(3) ベース	
ベース	

* 【使用目的又は効果】

1. 使用目的

本品は、診療用照明器で通常、軽傷、診療及び治療時に用いる。ある場所から別の場所へ容易に移動できるスタンドタイプである。

* 【使用方法等】

- (1) スタンドのベース部分の電源入力線をコンセントに差し込む。
- (2) ベース部分に取付けられている電源スイッチを ON にする。
- (3) ライトヘッド横の電源スイッチを ON にする。
- (4) 光を照射したい位置まで製品を移動させ光を照射させる。
- (5) ライトヘッド横のスイッチを押し、照度を調整する。
- (6) ライト使用後は、ライトヘッド横のスイッチを OFF にする。
- (7) ベース部分の電源スイッチを OFF にし、電源入力線をコンセントから外し、決められた位置に戻す。

【使用上の注意】

1. 取り扱い説明書をよく読み、理解してから使用すること。
2. ライトヘッドに損傷などの異常がある際には、本品を使用せず、修理を依頼すること。
3. 清掃やメンテナンスをする際には、ライトヘッドの温度が十分下がった事を確認してから行うこと。

* 【保管方法及び有効期間等】

高温、多湿、直射日光および水濡れを避け、清潔な換気のよい場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. ヒューズ交換の際には必ず同じレート（アンペア）の物と交換してください。
2. 使用前点検を行い、各作動部やスイッチ等が正常に作動するか確認してください。
3. 本品の設置は許可を受けた者、若しくは設置について十分な経験があるものが行うこと。
4. アンプの交換は許可された者意外は行わないこと。
5. ライトヘッドにものを引っ掛けたりすると故障の原因になるので行わないこと。

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 第一照明株式会社
住 所 〒174-0043 東京都板橋区坂下 1-32-26
T E L 03-3969-9223
F A X 03-3969-9269

製 造 業 者 第一照明株式会社
住 所 〒174-0043 東京都板橋区坂下 1-32-26
T E L 03-3969-9223
F A X 03-3969-9269

2. 寸法

名称	寸法（単位：mm）
(1) L1 ライトヘッド	W1：260 W2：336
(2) スタンドポール	H1：1260
	H2：620
(3) ベース	W1：435
	D1：551

（横：W、奥行：D、高さ：H）

取り扱い説明書を必ずご参照下さい。