

2014年12月（第3版）（新記載要領に基づく改訂）

2009年10月（第2版）

届出番号 27B1X00112104000

医 04 整形用品

一般医療機器 X線造影材入りガーゼ 32374000

アメディーゼ X

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

体内に留置しないこと

X線造影系部分を直接挟んで使用しないこと

（切断又は抜け落ちて体内遺残するおそれがあるため。）

X線造影系に電気メス等を近づけないこと。

（切断又は引火するおそれがあるため。）

【使用上の注意】

本品の使用は一回限り。再使用しないこと。

体内に留置しないこと。

使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【形状、構造及び原理等】

セルロース繊維を用いたガーゼ状製品のタテ糸のうち 2～4 本を X線造影材と置き換えて編みこんだもの。



【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

大衛株式会社

TEL 06-6921-7373

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、又は擦過傷、乾燥、汚染からの器官の保護を目的として、身体内部又は外科切開部に用いる綿又はセルロース製の薬品を含まない吸収材料をいう。X線で検知できる成分を用いている。

【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。

創傷面には滅菌して使用する。

滅菌は高圧蒸気滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌ができる。