

医 04 整形用品
一般医療機器 X線造影材入りガーゼ 32374000

10 カウントガーゼ X


再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止
体内に留置しないこと
X線造影系部分を直接挟んで使用しないこと
（切断又は抜け落ちて体内遺残するおそれがあるため。）
X線造影系に電気メス等を近付けないこと。
（切断又は引火するおそれがあるため。）

【形状、構造及び原理等】

セルロース繊維を用いたガーゼ状製品のタテ糸のうち 2～4 本を X線造影材と置き換えて編みこんだものをホルダーに装着している。

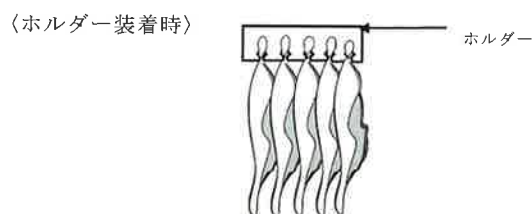

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、又は擦過傷、乾燥、汚染からの器官の保護を目的として、身体内部又は外科切開部に用いる綿又はセルロース製の薬品を含まない吸収材料をいう。X線で検知できる成分を用いている。

【使用方法等】

- 1.使用目的に応じ、適宜使用する。
- 2.ホルダーから取り外して使用する。
- 3.創傷面には滅菌して使用する。
- 4.滅菌は高圧蒸気滅菌、エチレンオキシドガス滅菌ができる。

【使用上の注意】

- 1.本品の使用は一回限り。再使用しないこと。
- 2.体内に留置しないこと。
- 3.使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。
- 4.使用に際してはホルダーに X線造影材を直接挟むと切れたり、抜け落ちて体内に残存する恐れがあるので、X線造影材部分以外のガーゼ状部分を挟んで使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元
大衛株式会社

TEL 06-6921-7373