

**2018年8月（第4版）
*2014年12月（第3版）

届出番号 27B1X00112105200

医 04 整形用品
一般医療機器 X線造影材入りスポンジ 13705000

アメディーゼ X 患部ガーゼ

再使用禁止

**【禁忌・禁止】

再使用禁止
体内に留置しないこと
X線造影材部分を直接挟んで使用しないこと
(切断又は抜け落ちて体内遺残するおそれがあるため。)
製品に電気メス等を近付けないこと。
(切断又は引火するおそれがあるため。)

**【形状、構造及び原理等】

X線造影材には糸とテープの2種類が存在します。

X線造影材（糸）
セルロース繊維を用いたガーゼ状製品のタテ糸のうち2～4本をX線造影材と置き換えて編みこんだものをぬい合わせたもの。（ヒモのついたものもある）

X線造影材組成（糸）
硫酸バリウム・ポリプロピレン・青色色素

X線造影材（テープ）
セルロース繊維を用いたガーゼ状製品にX線造影材を編みこみ、ぬい合わせたもの。（ヒモのついたものもある）

X線造影材組成（テープ）：
硫酸バリウム・ポリ塩化ビニル・青色色素

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする。X線で検知可能な成分を含有する器具をいう。

【使用方法等】

1. 使用方法

使用目的に応じ、適宜使用する。

創傷面には滅菌して使用する。

滅菌は高圧蒸気滅菌、エチレンオキシドガス滅菌ができる。

2. 使用后

血液等の体液が付着したものについては、医療廃棄物として処理する。

【使用上の注意】

本品の使用は一回限り。再使用しないこと。

体内に留置しないこと。

使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

大衛株式会社

TEL.06-6921-7373