

医 04 整形用品  
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ 35531000

## ワンウェイドレープ

### 再使用禁止

#### 【警告】

消毒用アルコール等の可燃性消毒薬を使用した場合、必ず乾燥していることを確認してから使用すること。

【電気メス等を使用する際、気化した成分に引火することがあるため。】

#### 【禁忌・禁止】

再使用禁止  
体内に留置しないこと


#### 【形状、構造及び原理等】

本品は、不織布製のドレープを包装したものである。

#### 種類

パウチ	あり・なし
ラミネートフィルム	あり・なし
固定テープ・紙（りけい紙）	あり・なし
穴あき	あり・なし

#### 断面図

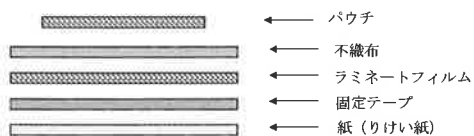

#### 【使用目的又は効果】

手術室やカテーテル処置室の汚染（器具やテーブルの上）から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布製の用具をいう。本品は患者を手術中の熱、炎又は他のエネルギーから保護するためにも使用する。本品は単回使用である。

#### 【使用方法等】

1. 本品を袋より取り出し、そのまま直ちに一回限り使用する。
2. 血液等の体液が付着したものについては、医療廃棄物として処理する。
3. 滅菌はエチレンオキサイドガス滅菌ができる。

#### 【使用上の注意】

1. 使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処理すること。
2. 製品本体に穴を空けるなどの追加工は絶対しないこと。
3. 包装が破損・汚損していたときまたは、製品そのものに異常がみられるものは使用しないこと。

#### 【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

大衛株式会社

TEL 06-6921-7373