

2017年12月（第2版）（新記載要領に基づく改訂）

2014年11月（第1版）

届出番号 27B1X00112110300

医 04 整形用品

一般医療機器 綿状パッド 32572000

アメディーゼガーゼスワブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止
体内に留置しないこと

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元
大衛株式会社

TEL.06-6921-7373

【形状、構造及び原理等】

綿 100%のガーゼ

本品は、白い布で、におい及び味はない。

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

【使用目的又は効果】

神経組織の保護、液の吸収、又は止血のために手術中に用いるコットンまたは合成繊維等のパッドをいう。

【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。

創傷面には滅菌して使用する。

滅菌は高圧蒸気滅菌、エチレンオキシドガス滅菌ができる。

【使用上の注意】

本品の使用は一回限り。再使用しないこと。

体内に留置しないこと。

破損・汚損時は使用しないこと。

使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。