

2014年12月（第3版）（新記載要領に基づく改訂）

2009年10月（第2版）

届出番号 27B1X00112201000

医 04 整形用品  
一般医療機器 医療脱脂綿 70975000

## 滅菌アルファコットン

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

再使用禁止  
再滅菌禁止  
体内に留置しないこと

#### 【形状、構造及び原理等】

綿 100%の脱脂綿

本品は、白色の繊維状の軟毛で、におい及び味はない。

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

#### 【使用目的又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料をいう。

#### 【使用方法等】

##### 1.使用方法

本品を滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに一回限り使用する。

##### 2.使用后

血液等の体液が付着したものについては、医療廃棄物として処理する。

##### 3.残品

滅菌袋から開封したものについては、使用したものと見なし、再使用しない。

#### 【使用上の注意】

本品の使用は一回限り。再使用しないこと。

体内に留置しないこと。

使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

1.直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

2.滅菌の使用期限（保証期限）は3年（自己認証による）、使用期限は、ラベルに記載。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

大衛株式会社

TEL 06-6921-7373