

医 04 整形用品
一般医療機器 コットンボール 11028000

滅菌アルファボールL

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 再滅菌禁止
- 体内に留置しないこと

【形状、構造及び原理等】

綿100%の脱脂綿

本品は、白色の繊維状の軟毛で、におい及び味はなく、形状は球状。

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

【使用目的又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊をいう。

【使用方法等】

1.使用方法

本品を滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに一回限り使用する。

2.使用後

血液等の体液が付着したものについては、医療廃棄物として処理する。

3.残品

滅菌袋から開封したものについては、使用したものと見なし、再使用しない。

【使用上の注意】

本品の使用は一回限り。再使用しないこと。

体内に留置しないこと。

使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1.直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- 2.滅菌の使用期限(保証期限)は3年(自己認証による)、使用期限は、ラベルに記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

大衛株式会社

TEL 06-6921-7373