

2014年12月（第3版）（新記載要領に基づく改訂）

2009年10月（第2版）

届出番号 27B1X00112204000

医 04 整形用品

一般医療機器 X線造影材入りガーゼ 32374000

## 滅菌アメディーゼ X

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

再滅菌禁止

体内に留置しないこと

X線造影系部分を直接挟んで使用しないこと

（切断又は抜け落ちて体内遺残するおそれがあるため。）

X線造影系に電気メス等を近付けないこと。

（切断又は引火するおそれがあるため。）

#### 【使用方法等】

##### 1.使用方法

本品を滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに一回限り使用する。

##### 2.使用後

血液等の体液が付着したものについては、医療廃棄物として処理する。

##### 3.残品

滅菌袋から開封したものについては、使用したものと見なし、再使用しない。

#### 【形状、構造及び原理等】

セルロース繊維を用いたガーゼ状製品のタテ糸のうち 2～4 本を X線造影材と置き換えて編みこんだもの。



#### 【使用上の注意】

本品の使用は一回限り。再使用しないこと。

体内に留置しないこと。

使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

1.直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

2.滅菌の使用期限（保証期限）は3年（自己認証による）、使用期限は、ラベルに記載。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

大衛株式会社

TEL 06-6921-7373

#### 【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、又は擦過傷、乾燥、汚染からの器官の保護を目的として、身体内部又は外科切開部に用いる綿又はセルロース製の薬品を含まない吸収材料をいう。X線で検知できる成分を用いている。