

医 04 整形用品

一般医療機器 X線造影材入りガーゼ 32374000

滅菌 10 カウントガーゼ X

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

再滅菌禁止

体内に留置しないこと

X線造影系部分を直接挟んで使用しないこと


（切断又は抜け落ちて体内遺残するおそれがあるため。）

X線造影系に電気メス等を近付けないこと。

（切断又は引火するおそれがあるため。）

【形状、構造及び原理等】

セルロース繊維を用いたガーゼ状製品のタテ糸のうち 2～4 本を X線造影材と置き換えて編みこんだものをホルダーに装着している。

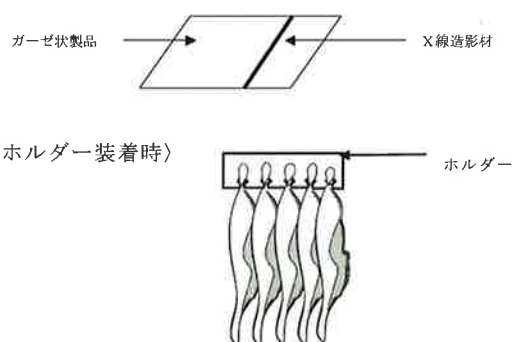

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、又は擦過傷、乾燥、汚染からの器官の保護を目的として、身体内部又は外科切開部に用いる綿又はセルロース製の薬品を含まない吸収材料をいう。X線で検知できる成分を用いている。

【使用方法等】

1.使用方法

本品を滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに一回限り使用する。

ホルダーから取り外して使用する。

2.使用後

血液等の体液が付着したものについては、医療廃棄物として処理する。

3.残品

滅菌袋から開封したものについては、使用したものと見なし、再使用しない。

【使用上の注意】

1.本品の使用は一回限り。再使用しないこと。

2.体内に留置しないこと。

3.使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

4.使用に際してはホルダーに X線造影材を直接挟むと切れたり、抜け落ちて体内に残存する恐れがあるので、X線造影材部分以外のガーゼ状部分を挟んで使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1.直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

2.滅菌の使用期限（保証期限）は 3 年（自己認証による）、使用期限は、ラベルに記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

大衛株式会社

TEL 06-6921-7373