

## 滅菌アメディーゼ X 患部ガーゼ AM


### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 再滅菌禁止
- 体内に留置しないこと
- X線造影糸部分を直接挟んで使用しないこと  
(切断又は抜け落ちて体内遺残するおそれがあるため。)
- X線造影糸に電気メス等を近付けないこと。  
(切断又は引火するおそれがあるため。)

#### 【形状、構造及び原理等】

ラミネートした不織布をガーゼで挟んで縫製したものの。

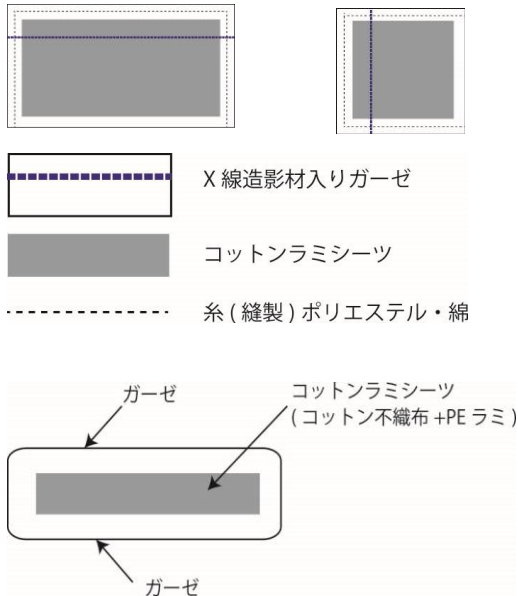

- イ.X線造影材入りガーゼ：セルロース繊維・硫酸バリウム・ポリプロピレン・青色色素
- ロ.コットンラミシート：ポリエチレン・綿
- ハ.糸（縫製）：ポリエステル・綿

#### 【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする。X線で検知可能な成分を含有する器具をいう。

#### 【使用方法等】

##### 1.使用方法

本品を滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに一回限り使用する。

##### 2.使用後

血液等の体液が付着したものについては、医療廃棄物として処理する。

##### 3.残品

滅菌袋から開封したものについては、使用したものと見なし、再使用しない。

#### 【使用上の注意】

本品の使用は一回限り。再使用しないこと。

体内に留置しないこと。

使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

大衛株式会社

TEL.06-6921-7373