

医 04 整形用品  
一般医療機器 綿状創傷被覆・保護材 11751000

## アメジスト・ドレッシング

### 再使用禁止


#### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 再滅菌禁止
- 体内に留置しないこと


#### 【形状、構造及び原理等】

本品は医療脱脂綿にポリエチレンネットをラミネートし、適当な大きさに裁断して、包装材料（滅菌紙又はラミネートフィルム）で挟み、周囲をヒートシールで密封したものである。

##### 1. 平面図

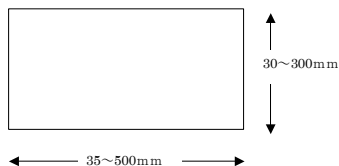

##### 2. 断面図

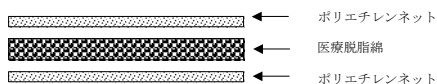

#### 【使用目的又は効果】

創傷の被覆

#### 【使用方法等】

##### 1. 使用方法

患部を清潔にし、パッド部が患部をおおうようにあて、別の「粘着包帯」や「サージカルテープ」等で固定する。

##### 2. 使用后

廃棄する時は自治体の区分にしたがって処理する。

##### 3. 残品

滅菌袋を開封したのものについては、使用したものと見なし、再使用しない。

#### 【使用上の注意】

本品の使用は一回限り。再使用しないこと。  
特に分泌物が多いと、パッドが患部にくっつくことがあります。多い時は適時に取り替えること。  
パッド部分が濡れたり、汚れたら患部の治りが悪くなるので、新しいものと取り替えること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

- 直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- 滅菌の使用期限（保証期限）は3年（自己認証による）、使用期限は、ラベルに記載。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

大衛株式会社

TEL 06-6921-7373