

滅菌ワンウェイドレープ

再使用禁止

【警告】

消毒用アルコール等の可燃性消毒薬を使用した場合、必ず乾燥していることを確認してから使用すること。

【電気メス等を使用する際、気化した成分に引火することがあるため。】

【禁忌・禁止】

再使用禁止

再滅菌禁止

体内に留置しないこと


【形状、構造及び原理等】

本品は、不織布製のドレープを包装したものである。

種類

パウチ	あり・なし
ラミネートフィルム	あり・なし
固定テープ・紙（りけい紙）	あり・なし
穴あき	あり・なし

断面図

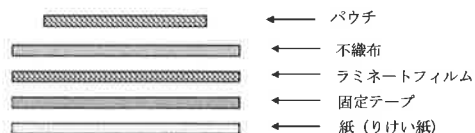

【使用目的又は効果】

手術室やカテーテル処置室の汚染（器具やテーブルの上）から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布製の用具をいう。本品は患者を手術中の熱、炎又は他のエネルギーから保護するためにも使用する。本品は単回使用である。

【使用方法等】

1.使用方法

本品を滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに一回限り使用する。再滅菌をして使用しない。

2.使用後

血液等の体液が付着したものについては、医療廃棄物として処理する。

3.残品

滅菌袋から開封したものについては、使用したものと見なし、再使用しない。

【使用上の注意】

1.本品は無菌操作に精通した医療従事者の管理下で使用すること。

2.使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

3.製品本体に穴を空けるなどの追加工は絶対しないこと

4.包装が破損・汚損していたときまたは、製品そのものに異常がみられるものは使用しないこと。

5.エチレンオキサイドガス滅菌済のため開封後直ちに使用すること。

6.使用期限を過ぎたものは使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1.直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

2.滅菌の使用期限（保証期限）は3年（自己認証による）、使用期限は、ラベルに記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

大衛株式会社

TEL 06-6921-7373