

医 04 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏 34864000

アメジストエイド


再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止
再滅菌禁止

【形状、構造及び原理等】

本品は、絆創膏、パッド（不織布及びネットファブリック）、保護用被覆物及び補助フィルムからなる。

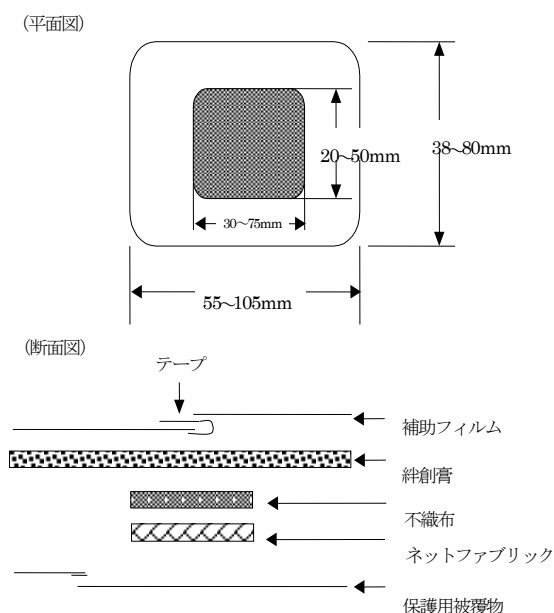

【使用目的又は効果】

傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法等】

1.使用方法

- ア 創傷面を清潔にして、滅菌袋より中身を取り出す。
- イ 保護用被覆物を中央のカットラインより外側に向かって片方をゆっくり剥がし、粘着部分を出す。
- ウ 残りの保護用被覆物を持ち、パッドの半分が傷口を保護するように貼り付ける。
- エ 残りの保護用被覆物を中央のカットラインより外側に向かってゆっくり剥がし、全体を押さえ、しっかり貼り付ける。
- オ 表面の補助フィルムを中央のカットラインより外側に向かって片方ずつゆっくりはがし、全体を押さえ、肌に密着させる。

2.使用後

廃棄する時は、自治体の区分にしたがって処理する。

3.残品

滅菌袋から開封したのものについては、使用したものと見なし、再使用しない。

【使用上の注意】

- 1.患部を清潔にし、パッド部分を汚さないように注意すること。
- 2.粘着面を直接患部に貼らないこと。
- 3.防水目的の使用後（お風呂、シャワー、水仕事、プール等の後）は、すみやかに取り外すこと。
- 4.パッド部分が濡れたり、汚れたまま放置すると患部の治りが悪くなるので、新しいものと貼り替えること。
- 5.本品の使用により、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。
- 6.包装を開封したものはすぐに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- 1.直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- 2.小児の手の届かないところに保管すること。

<使用期限>

個装に記載（自己認証）。少ない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

大衛株式会社

TEL 06-6921-7373