

アメジストエイドAT

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止
再滅菌禁止

【形状、構造及び原理等】

本品は、所定の大きさに切断した粘着シートの中央部にパッドを貼着し、剥離シートにて覆った製品である。

【使用目的又は効果】

創傷面の被覆・保護

【使用方法等】

1.貼付

- (1) 創傷面を清潔にし、水分をよく取り除く。
- (2) 剥離紙の一方を剥がし、パッド部分を創傷面に当て、粘着テープを貼付する。
- (3) 残りの剥離紙を剥がしながら粘着テープを貼付し、創傷面に固定する。
- (4) 全体を軽く押さえてよく密着させる。
- (5) グリップフィルムを上部に引き上げて、キャリアフィルムを剥がす。

2.除去

- (1) 粘着テープの端を少し剥がす。
- (2) 剥がした先を持ち、皮膚が変形しないように皮膚を押さえながら引っ張り、ゆっくり剥がす。

【使用上の注意】

1. 患部を清潔にし、パッド部分を汚さないように注意すること。
2. 粘着面を直接患部に貼らないこと。
3. 防水目的の使用後（お風呂、シャワー、水仕事、プール等の後）は、すみやかに取り外すこと。

4. パッド部分が濡れたり、汚れたまま放置すると患部の治りが悪くなるので、新しいものと貼り替えること。
5. 本品の使用により、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。
6. 包装を開封したものはすぐに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
2. 小児の手の届かないところに保管すること。

<使用期限>

個装に記載（自己認証）。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

大衛株式会社

TEL.06-6921-7373