

医 04 整形用品  
一般医療機器 綿状パッド 32572000

## 滅菌アメジストメンポーガーゼZ

### 再使用禁止

---

#### 【禁忌・禁止】

再使用禁止  
再滅菌禁止  
体内に留置しないこと

#### 【保管方法及び有効期間等】

- 1.直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- 2.滅菌の使用期限（保証期限）は3年（自己認証による）、使用期限は、ラベルに記載。

#### 【形状、構造及び原理等】

綿100%の脱脂綿・綿100%のガーゼからなる。  
（紙・カタン糸があるものもある。）  
白色の繊維状の軟毛で、におい及び味はない。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元  
大衛株式会社

TEL.06-6921-7373

#### 【使用目的又は効果】

神経組織の保護、液の吸収、又は止血のために手術中に用いるコットンまたは合成繊維等のパッドをいう。

#### 【使用方法等】

- 1.使用方法  
本品を滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに1回限り使用する。
- 2.使用後  
血液等の体液が付着したものについては、医療廃棄物として処理する。
- 3.残品  
滅菌袋から開封したものについては、使用したものと見なし、再使用しない。

#### 【使用上の注意】

本品の使用は1回限り。再使用しないこと。  
体内に留置しないこと。  
使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。