

\*2026 年 1 月（第 2 版）  
2025 年 8 月（第 1 版）

届出番号 27B1X00112225000

機械器具 29 電気手術器  
一般医療機器 単回使用電極クリーナー 70654000

## チップクリーナー

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

再使用禁止（複数の患者に使用しないこと）  
再滅菌禁止


#### \*【保管方法及び有効期間等】

直射日光、水濡れ、火気及び極端に高温又は低温、多湿を避け、湿気の少なく涼しく清潔な場所に保管すること。

使用期限はラベルに記載（自己認証による）。

#### 【形状・構造及び原理等】

##### 1. 形状

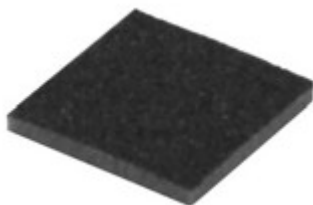

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

大衛株式会社

TEL. 06-6921-7373

##### 2. 原理

研磨砥粒の表面に被研磨物を当てて、付着物をこすり落とす。

#### 【使用目的又は効果】

アクティブ電極を使用した際、電極に付着した炭化物等の除去を目的とした、単回使用のクリーナー。

#### 【使用方法等】

##### 1. 使用方法

- 1) 本品を、滅菌包装より無菌的に取り出す。
- 2) 付着した炭化物等を擦るように除去する。
- 3) 裏面のシールをはがして、術衣、器械台などに貼り付けて、使用したり、指で山折りにしてバイポーラ用ピンセットの内側の付着物を除去することができる。

##### 2. 使用方法に関連する使用上の注意

過度な力で擦らないこと[バイポーラ用ピンセット等の先端部を傷つけることがある]。

#### 【使用上の注意】

その他の注意

使用前に、汚れ・破損・変形等を点検すること。