

器 1 2 理学診療用器具
一般医療機器 温熱用パック 3 7 2 4 0 0 1 0
サーマルパック

【禁忌・禁止】

- ・以下の症状を示す人、又は診断を受けた人への使用はしないこと。
①重篤な末梢神経傷害、②急性の炎症及び外傷、③悪性腫瘍及び肉腫、
④潰瘍がある場合、⑤高血圧症で重症の場合、⑥高熱時及び衰弱時、
⑦その他医師が不適当と判断した場合。
- ・他の治療器との併用は行わないこと。

【形状・構造及び原理等】



加熱媒体の入ったパック

【使用目的又は効果】

消炎鎮痛処置（温熱治療）を行う。

【使用方法等】

1. 約 70℃に温めたお湯、または加温装置でパック内部の保温剤が膨らむまで加熱してください。
2. 加熱した本品をタオルに包んで患部にあてます。
3. 熱過ぎたり、ぬるいようであればタオルの枚数で温度を調節してください。

【使用上の注意】

1. 引掛金具で生地を傷つけたり、穴を開けないよう注意してください。
2. 体の下に敷いたり、椅子の背もたれとの間に挟んだりする等のご使用は避けてください。
（圧力により、保温剤が縫い目から出てくる場合があります）
3. 必ず水道水をご使用ください。地下水や温泉水などの鉄分を多く含んだ水またはお湯の使用はしないでください。
4. 一週間に一度は、必ず新しい水に交換してください。
5. 患部に知覚鈍麻がある場合は、火傷を起こしやすいので、充分に注意をはらってください。
6. 湿熱が問題の場合は、サーマルパック全体をポリ袋などで包んで乾熱としてご使用ください。

【保守・点検に係る事項】

1. 表面の汚れはやわらかい布かスポンジで、水またはぬるま湯を流しながら拭いてください。
2. 長期間使用しないときは、カビが生えないようきれいにふきとり、日陰の風とおしのよい場所で保管願います。
3. 一度ご使用後、乾いてが硬くなった場合は再びお湯につけると元の状態に戻ります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

タイガー医療器株式会社

電話：072-924-7878（代表）