

類別: 機械器具 21 内臓機能検査用器具
一般医療機器 一般的名称: 単回使用心電用電極 (JMDNコード: 35035000)

スリーエス ECG 電極

再使用禁止

【禁忌・禁止】

<使用方法>

1. 再使用禁止
2. しわの上、骨ばった部分、乳頭、傷・炎症部分には貼らないこと。[電極が適切に密着しない。または炎症の原因となる。]

<併用医療機器> [相互作用の項参照]

1. 核磁気共鳴画像診断装置 (MRI 装置) [局部的に発熱し、火傷を生じる可能性がある。]


3. 相互作用 (他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)

1. [併用禁忌] (併用しないこと)

| 医薬品／ 医療機器 の名称等 | 臨床症状・ 措置方法 | 機序・危険因子 |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|
| 核磁気共鳴画像診断装置 (MRI 装置) | 使用禁止 | 局部的に発熱し、 火傷を生じる可 能性がある。 |

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

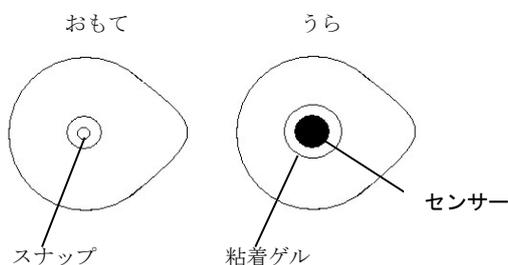

*モデルにより形状に違いがある。

2. 原理

体表面に設置し、体表面の心電信号を心電波形処理装置に伝達する導体である。この活動電位を記録する一般的な装置は、心電計 (ECG) である。

3. 組成

銀・塩化銀

4. 品目仕様

未滅菌品

AC インピーダンス 3 kΩ 以下

DC オフセット電圧 100 mV 以下

【使用目的又は効果】

体表に設置し、体表の電気信号を処理装置 (心臓の電気活動をグラフで表示する) に伝達する導体をいう。この電気活動を記録する一般的な装置は、心電計 (ECG) である。

【使用方法等】

1. 電極を装着する皮膚を清潔にする。
2. 電極にリード線をつなぐ。
3. 電極ゲル面のシールをはがす。
4. 電極ゲル面を皮膚に接着させる。
ゲル面が皮膚にしっかりと接着しているか確認する。

【使用上の注意】

1. 使用注意 (次の患者には慎重に適用すること)

1. アレルギー体質、皮膚過敏症のある患者

2. 重要な基本的注意

1. 電極の粘着部分は清潔にし、ゴミが付着しないように、また濡れないように注意すること。

【保管方法および有効期間等】

1. 保管方法

腐食性のガスのない、湿気の少ない涼しい場所で保管する。水濡れに注意する。

2. 有効期間

有効期間は、自己認証 (製造元データ) による。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 大正医科器械株式会社

電話番号: 06-6553-9666

製造業者: Shanghai Shenfeng Medical & Health Articles Co., Ltd.
(中国)