

類別：機械器具 12 理学診療用器具
一般医療機器 一般的名称：止血用押圧器具（JMDN コード：70617000）

KDL プレッシャーバンデージ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止

**【形状・構造及び原理等】

押圧式

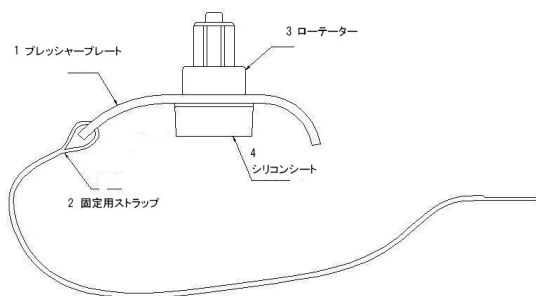

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
直射日光、水濡れを避け、湿気の少ない清浄な環境で保管すること。
2. 有効期間
有効期間は、自己認証（製造元データ）による。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：大正医科器械株式会社

電話番号：06-6451-7177

製造業者：Shanghai INT Medical Instruments
Co.,Ltd.（中国）**

【使用目的又は効果】

血管造影、その他の診断処置終了時に、大腿部又は前腕（橈骨動脈）部のカテーテル挿入部位を圧迫止血するために用いる器具をいう。

**【使用方法等】

1. 包装を開け、製品を取り出す。
2. ガーゼを止血部位にのせる。
3. ローテーターを半時計回しに動かし、シリコンパッドが完全に上部に上がっていることを確認する。
4. シリコンパッドが穿刺部位にのせたガーゼの真上に位置するようにバンドを装着する。
5. 患者の状態を確認しながら、ローテーターを時計回しに動かし止血する。この時ローテーターを強く締めすぎないように注意する。脈拍が感じられる程度にする。
6. 止血が確認できたら本品を取り外す。