

歯科材料 (09) 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研削器材 70908000  
**ZENOTEC mini ミリングバー**

**【形状・構造及び原理等】**

## 1) 製品形状

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| WZ692001<br>ジルコニア用 HS ハンド 2.5mm MINI 用                                            | WZ692002<br>ジルコニア用 HS ハンド 1.0mm MINI 用                                            |
|  |                                                                                   |
| WZ692003<br>ジルコニア用 HS ハンド 0.7mm MINI 用                                            |                                                                                   |

## 2) 材質：超硬質合金（刃先部分：ダイヤモンドコート）

**【使用目的又は効果】**

各種歯科用 CAD/CAM 材料を切削・切削加工する為に用いる回転器具で、専用の加工機に取り付けて使用する。

**【使用方法等】**

〔本品と併用する医療機器〕

- ・ 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット  
「Zeno Tec システム/医療機器届出番号：27B1X00041000410」

- 1) 機器の取扱説明書に従い、本材を機器本体に取り付ける。
- 2) 作成した加工用データを機器に送信して切削加工を行う。

**【使用上の注意】**

〈重要な基本的注意〉

- 1) 本品は、専用の加工機以外には使用しないこと。
- 2) 変形・破損・腐食等があるものは使用しないこと。
- 3) 本品の使用中に異常な振動や音を感じた際は、直ちに使用を中止すること。
- 4) 本品は刃物であるため、取り扱いには十分注意すること。
- 5) 複数の種類の材料を加工する場合は、材料毎にそれぞれ別のミリングバーを用意して使用すること。（異なる材料の切削屑が付着すると、切削不良の原因となります。）
- 6) 本品の切削能力が低下した際は、新しいものと交換すること。

**【保管方法及び有効期間等】**

〈保管方法〉

- ・ 高温、多湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：大信貿易株式会社 浜寺営業所  
連絡先：0120-382-118  
製造業者：Ivoclar Vivadent AG  
(リヒテンシュタイン侯国)

取扱説明書を必ずご参照ください。