

機械器具（66）歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具 70682000
（歯科用注入器具 70718000）

CAVEX シリコン印象材 ミキシングキャナル

再使用禁止

【禁忌・禁止】
・再使用禁止

*【形状・構造及び原理等】

1) 製品形状

ミキシングキャナル		口腔内注入チップ	
			
CA050M ヘビーボディ用	CA051M インジェクション用	CA050K ヘビーボディ用	CA051K インジェクション用

2) 材質

製品番号	CA050M	CA051M	CA050K	CA051K
材質	ポリプロピレン/ ポリアセタール		ポリプロピレン	

3) 原理

ミキシングキャナルをカートリッジの先端にねじ込むことで、カートリッジと本品を固定することができる。カートリッジ内に隔離されて充填されている2材からなるペースト状歯科用材料が、吐出され、本品の内部を押し出されるに従い、内部に固定されたらせん状のインナーエレメントが適切な隙間を持った上で1つ1つ正・逆方向の順で配列されているため、2材のペースト状材料が混練されていく。ミキシングキャナルの先から歯科用材料が出る際に均一なペーストとなっている。ミキシングキャナルの先に口腔内注入チップをとりつけることにより、その形状が円弧を描いていることから、患者の臼歯部等にペースト状材料を注入しやすくなる。

*【使用目的又は効果】

一般的名称	使用目的	製品番号
歯科用練成器具	歯科材料（印象材料、セメントなど）を練和又は混和する器具をいう。注入機能を有することがある。印象材料練和器及びセメント練成器を含む。ヘラ状の器具を除く。	CA050M CA051M
歯科用注入器具	歯科材料を口腔内又はトレーに注入するために用いる器具をいう。	CA050K CA051K

**【使用方法等】

本品はCAVEXシリコンA印象材（ヘビーボディ（製品番号：CA050）又はインジェクションタイプ（製品番号：CA051））の各カートリッジに接続して使用するものです。ご使用の際は必ず併用する製品の添付文書もご覧ください。

- 1) ディスペンサーにカートリッジを装着します。
- 2) カートリッジのキャップ（又は使用済みのミキシングキャナル）を取り外し、少量を押し出して2種類のペーストが均等に吐出されていることを確認します。
- 3) 本品の固定用キャップにある突起をカートリッジ先端部のV字型の切込みに合わせてはめ込み、時計方向へ90°回転させ本品を固定してください。口腔内の精密な部分に注入する際は、ミキシングキャナルの先に口腔内注入チップを付けてください。
- 4) ディスペンサーのハンドルを握り、ペーストを押し出すと印象材が本品内で練和されて先から吐出されます。少量押し出し、2種類のペーストが均等に練和・排出されていることを確認してください。
- 5) 本品を取り外す際は反時計方向へ90°回転させ、本品の突起とカートリッジの切込みを合わせて引き抜きます。

〔本品と併用する材料〕

販売名	認証及び届出番号
CAVEX シリコンAヘビーボディ	219AFBZX00034000
CAVEX シリコンAインジェクションタイプ	219AFBZX00033000
CAVEX シリコンAディスペンシングガン	27B1X00041000506

（使用方法に関連する使用上の注意）

- 1) 使用後はカートリッジの内容物が空気にふれないように、使用後の本品を付けたままにする、もしくは元のキャップを取り付けて密閉すること。

**【使用上の注意】

（重要な基本的注意）

- 1) 本品に損傷、変形（割れ、ひび）等がある場合は使用しないこと。

*【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

- ・高温、多湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：大信貿易株式会社 浜寺営業所
連絡先：0120-382-118
製造業者：CAVEX Holland BV（オランダ）
カーベックス社