

歯科材料(03) 義歯床材料
一般医療機器 歯科印象トレー用レジン 70832000
ドレーブ トレー材

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・本品の配合成分及び類似成分、メタクリル酸系モノマーに対して過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと

***【形状・構造及び原理等】**

1) 製品形状



2) 材質

トレー材：モノマー (UDMA 他)、フィラー (ガラスビーズ)、
重合開始材、他
光沢剤：メタクリル酸メチル、他

3) 色


ピンク (トレー材)

****【使用目的又は効果】**

本品は、個人トレー、ベースプレート等の作製に用いる。

*****【使用方法等】**

- 1) 石膏模型にパラフィンワックスを用いて印象材のスペースを付与する。
その上に本品を圧接して外径を整える。
(図1)

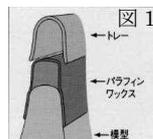

- 2) 模型上でデザインナイフ等を用いて本品を適切な形にカットし、個人トレーの形態を整える。残ったトレー材や新たなトレー材を使用して、柄 (ハンドル部) を取り付ける。
- 3) トレー表面 (印象材注入部分以外) にブループリント光沢剤を塗布し光重合器にて重合させる。(300~400nm/5分間)
- 4) 必要に応じて、インプラント上部構造スクリューのアクセスホールや印象材保持のための横穴を開ける。
完成後 24 時間以降に印象採得することをお勧めします。

(使用方法に関連する使用上の注意)

- 1) 本品の硬化が始まる為、作業は自然光下で約 10 分以内に行うこと。
- 2) 光重合の照射光を直視しないこと。
- 3) 個人トレーを患者の口腔内に試適・印象採得する前に、必ず消毒を行うこと。

****【使用上の注意】**

(重要な基本的注意)

- 1) 本品の使用により、発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 2) 本品は目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合にはすぐに多量の清潔な流水で洗浄し、専門医の診断を受けること。
- 3) 皮膚に付着した場合には、大量の水で洗い流すこと。

- 4) 研磨の際は粉塵による人体への影響を避けるために吸塵装置及び防塵マスク等を使用し、粉塵を吸入しないこと。目の損傷を防止するために防護メガネ等を使用すること。
- 5) 技工作業を行う際は換気設備の整った場所で行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

(保管方法)

- ・高温、多湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。開封後は冷蔵庫に入れて保管することをお勧めします。
- ・開封後は容器を移し変えたりしないこと。光があたると重合(硬化)が始まる為、使用後は容器をすみやかに密封すること。

(使用期限)

- ・本品は包装に記載の使用期限までに使用すること。
[記載の使用期限は、自己認証(製造業者データ)による。]
(例：☒○○○○-○○は使用期限○○○○年○○月末日を示す。)

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：大信貿易株式会社 浜寺営業所

連絡先：0120-382-118

製造業者：メガデンタ デンタルプロダクト社 (ドイツ)
MEGADENTA Dentalprodukte GmbH