

* 機械器具（58）整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 70757000
スキャンボディ

【禁忌・禁止】

- ・本品は模型上で使用するものである。口腔内では使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1) 製品形状

				
E シリーズ	I シリーズ	K シリーズ	N シリーズ	R シリーズ
				
S シリーズ	T シリーズ	F シリーズ	H シリーズ	L シリーズ

2) 材質

プラスチック

3) 原理

本品は、複模型に埋入した擬似インプラントに固定してスキャンニングすることにより、コンピュータ画面上での歯科用インプラントの上部構造の設計を可能にした擬似アバットメントであり、設計データを元に切削加工した上部構造を、歯科用インプラントに対応する既製の歯科用インプラントアバットメントのベースと組み合わせることにより、審美的に優れた個々の患者に最適な形態の上部構造を提供するものである。

****【使用目的又は効果】**

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具である。

****【使用方法等】**

本品は、以下の組合せでご使用ください

	本品製品番号	スクリュー製品番号
E シリーズ	DCE800SB	MEE60
	DCE810SB	MEE61
	DCE820SB	
	DCE830SB	
I シリーズ	DCI800SB	MEI61
	DCI810SB	
K シリーズ	DCK800SB	MEK60
	DCK810SB	MEK61
	DCK820SB	MEK62
N シリーズ	DCN800SB	MEN60
	DCN810SB	MEN62
	DCN820SB	
R シリーズ	DCR800SB	MER60
	DCR810SB	
	DCR820SB	
S シリーズ	DCS800SB	MES60
	DCS820SB	MES61
T シリーズ	DCT800SB	MET60
	DCT805SB	
	DCT810SB	
F シリーズ	DCF800SB	MEF60
	DCF810SB	MEF61
H シリーズ	DCH800SB	MEH60
	DCH810SB	
L シリーズ	DCL800SB	MEL60
	DCL810SB	

- 1) インプラントネックが再現された作業模型上の技工用アナログに、対応するスキャンボディをスクリューで固定する。
- 2) 各種歯科用 CAD/CAM システムのスキャナーを用いて 1) の模型をスキャンニングする。
- 3) 保存されたスキャンデータをもとに CAD 用のソフトウェアで補綴物を設計する。

〔本品と併用する材料〕

本品を使用する際は、以下の製品を併用してください。

また併用する製品の添付文書に従ってください。

販売名：カスタムアバットメントスクリュー

届出番号：27B1X00041000605

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) 本品をスクリューで固定する際、スクリューが回転しなくなつてからさらにトルクをかけないこと。（本品の破損や、正確な位置情報が取得できない恐れがある。）

****【使用上の注意】**

〈重要な基本的注意〉

- 1) 補綴物の設計は、専用のアプリケーションソフトウェアを使用すること。
- 2) 本品は併用する歯科用 CAD/CAM システムの使用 방법에準じて使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・高温、多湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：大信貿易株式会社 浜寺営業所

連絡先：0120-382-118

製造業者：エヌティートレーディング社（ドイツ）
nt-trading GmbH & Co.KG