

* 機械器具（58）整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 70757000
カスタムアバットメントスクリュー

【禁忌・禁止】

- ・本品は模型上で使用するものである。口腔内では使用しないこと

【形状・構造及び原理等】

1) 製品形状

E シリーズ	I シリーズ	K シリーズ	N シリーズ	R シリーズ
S シリーズ	T シリーズ	F シリーズ	H シリーズ	L シリーズ

2) 材質

チタン合金 グレード 5

3) 原理

対応する擬似インプラントと擬似アバットメントを本品でスクリュー固定する。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具である。

****【使用方法等】**

本品は、以下の組合せでご使用ください

	本品製品番号	スキャンボディ製品番号
E シリーズ	MEE60	DCE800SB
	MEE61	DCE810SB
		DCE820SB
		DCE830SB
I シリーズ	MEI61	DCI800SB
		DCI810SB
K シリーズ	MEK60	DCK800SB
	MEK61	DCK810SB
	MEK62	DCK820SB
N シリーズ	MEN60	DCN800SB
	MEN62	DCN810SB
		DCN820SB
R シリーズ	MER60	DCR800SB
		DCR810SB
		DCR820SB
S シリーズ	MES60	DCS800SB
	MES61	DCS820SB
T シリーズ	MET60	DCT800SB
		DCT805SB
		DCT810SB
F シリーズ	MEF60	DCF800SB
	MEF61	DCF810SB
H シリーズ	MEH60	DCH800SB
		DCH810SB
L シリーズ	MEL60	DCL800SB
		DCL810SB

- 1) インプラントネックが再現された作業模型上の技工用アナログへ、対応するスキャンボディを本品で固定する。

〔本品と併用する材料〕

本品を使用する際は、以下の製品を併用してください。
また併用する製品の添付文書に従ってください。

販売名：スキャンボディ

届出番号：27B1X00041000604

（使用方法に関連する使用上の注意）

- 1) スキャンボディを本品で固定する際、スクリューが回転しなくなってからさらにトルクをかけないこと。（本品の破損や、正確な位置情報が取得できない恐れがある。）

****【使用上の注意】**

（重要な基本的注意）

- 1) 補綴物の設計は、専用のアプリケーションソフトウェアを使用すること。
2) 本品は併用する歯科用 CAD/CAM システムの使用方法に準じて使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

- ・高温、多湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製 造 販 売 業 者：大信貿易株式会社 浜寺営業所

連 絡 先：0120-382-118

製 造 業 者：エヌティートレーディング社（ドイツ）

nt-trading GmbH & Co.KG