

歯科材料（09）歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用スチール切削器具 70743000
J O T A 技工用インスツルメント

【形状・構造及び原理等】

1) 製品形状



2) 材質：ステンレススチール

【使用目的又は効果】

スチール製の作業部をもち、歯科技工用ハンドピース等に装着し、金属、プラスチック、陶材、又は同種の材料を研削するために用いる研削器具をいう。

【使用方法等】

本品を歯科技工用ハンドピースに接続し、断続的に義歯等に押し付けて研削する。

（使用方法に関連する使用上の注意）

- 1) 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- 2) 以下の適正回転速度を厳守し、これ以上の回転数で使用しないこと。

適正回転速度（rpm）	3,000－7,000
-------------	-------------

- 3) ハンドピースメーカーの指示に従い、シャンクを確実に奥まで挿入して半チャックでないことを確認すること。
- 4) 無理な角度や過度の加圧での使用は避けること。過剰な圧力は器具の破損や過熱を生じる恐れがあります。

【使用上の注意】**〈重要な基本的注意〉**

- 1) 研磨の際は粉塵による人体への影響を避けるために吸塵装置及び防塵マスク等を使用し、粉塵を吸入しないこと。目の損傷を防止するために防護メガネ等を使用すること。

【保管方法及び有効期間等】**〈保管方法〉**

- ・高温、多湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：大信貿易株式会社 浜寺営業所
連絡先：0120-382-118
製造業者：ジョタ社（スイス）
JOTAAG