


機械器具（70）歯科用鋳造器
一般医療機器 歯科技工用ポーセレン焼成炉 35762000
DDアーガスファイア（CAM9975）

【形状・構造及び原理等】

1) 製品形状

DEKEMA AUSTROMAT 624（CAM9975）

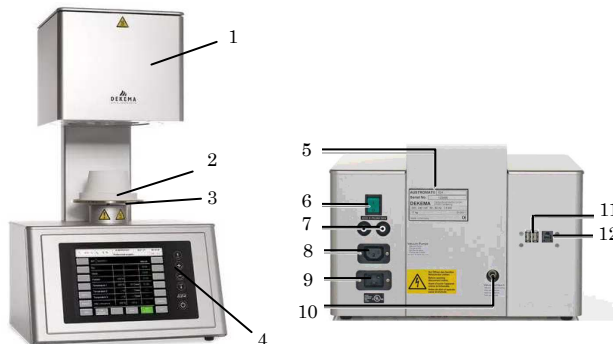

番号	名称
1	焼成チャンバー
2	焼成テーブル
3	焼成台
4	操作パネル
5	表示ラベル
6	電源スイッチ
7	ヒューズ及びヒューズホルダー
8	真空ポンプ用電源コネクタ
9	本体用電源コネクタ
10	真空ホース接続用ジョイント
11	USB ポート
12	ネットワーク接続コネクタ

2) 寸法・重量

寸法：幅 383×奥行 343×高さ 653（mm）

重量：約 17.5kg

3) その他

項目		仕様
電源電圧周波数		100V・50/60Hz
消費電力		最大 1450W
電撃保護の形式の分類		クラス I
最高設定温度		1200℃
使用温湿度範囲	温度	15～35℃
	湿度	最大 60%
	高度	2000m 以下

【使用目的又は効果】

ポーセレンを焼成するために歯科技工で使われる炉をいう。

【使用方法等】

詳細な操作方法については、本器に付属の取扱説明書を参照すること。

- 1) 本器の主電源のスイッチを入れ、焼成する歯科修復物を焼成台に設置されている焼成テーブルに並べる。
- 2) 焼成する歯科修復物に適した焼成プログラムを選択し、焼成を開始する。
- 3) 焼成終了後、焼成テーブルから歯科修復物を取り出す。

（使用方法に関連する使用上の注意）

- 1) 本器の電源供給は定格に合致した電圧の電源を用いること。
- 2) 本器の重量に耐えうる水平な台の上に設置すること。また、側面及び背面は壁面より 20cm 以上のスペースを設けること。
- 3) 本機器の加熱中及び加熱後は、焼成台及びその周囲が高温となるため火傷に注意すること。

【使用上の注意】

（重要な基本的注意）

- 1) 引火性の物や可燃性の物を本器の周囲に置かないこと。
- 2) 電源コードは延長させないこと。
- 3) 本器は湿度の高い場所や濡れた場所で使用しないこと。
- 4) 電源コードを抜く場合には電源プラグを持ち、電源コードに無理な力を加えないこと。
- 5) 濡れた手で電源コードの抜き差しを行わないこと。
- 6) 本品の改造・分解を行わないこと。
- 7) 使用前には点検を実施し、故障が無いことを確認すること。
- 8) 長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜くこと。
- 9) 技工作業を行う際は換気設備の整った場所で作業を行うこと。
- 10) 取扱説明書を参照すること。
- 11) 本品を設置する際の電気工事は有資格者が行うこと。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 本品は定期的に清掃及び保守点検を行うこと。手順については、取扱説明書の保守・点検の項を参照すること。
- 2) 清掃や点検等を行う際は、電源プラグをコンセントから抜き、機器が完全に冷めていることを確認すること。
- 3) 本器の使用の際に異常が発見された場合は、直ちに使用を中止し、専門家に修理を依頼すること。

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

- ・直射日光を避けて、温度 10～50℃、湿度最大 80%（結露が無いこと）で保管すること。
- ・本品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：大信貿易株式会社 浜寺営業所

連絡先：0120-382-118

製造業者：デケマ デンタル-ケラミコフェン社（ドイツ）

DEKEMA Dental-Keramiköfen GmbH

取扱説明書を必ずご参照ください。