

機械器具（58）整形用器具器械
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 70757000
補綴用補助パーツ チタンベース スキャン

【禁忌・禁止】

- ・本品は模型上で使用するものである。口腔内では使用しないこと。

***【形状・構造及び原理等】

1) 製品形状

①チタンベース スキャン



製品番号	製品名	対応する スクリュー
A-BASTZR-M-330-4	プレミアムチタンベース（丸）φ3.30 H4	VM2-180 ※1
A-BASTZR-M-330-6	プレミアムチタンベース（丸）φ3.30 H6	
A-BASTZR-S-330-4	プレミアムチタンベース（角）φ3.30 H4	
A-BASTZR-S-330-6	プレミアムチタンベース（角）φ3.30 H6	
A-TG-BASTZR-S-M-4	プレミアムTGチタンベース MP（角）H4	A-TG-VM-180 ※2
A-TG-BASTZR-S-W-4	プレミアムTGチタンベース WP（角）H4	A-TG-VM-200 ※2

②F スクリュー



製品番号	製品名
VM2-180	プレミアムフィクションスクリュー M1.8
VM2-180-10	プレミアムフィクションスクリュー M1.8 10 本
A-TG-VM-180	プレミアムTGフィクションスクリュー M1.8
A-TG-VM-180-10	プレミアムTGフィクションスクリュー M1.8 10 本
A-TG-VM-200	プレミアムTGフィクションスクリュー M2.0
A-TG-VM-200-10	プレミアムTGフィクションスクリュー M2.0 10 本

※1 販売名/承認番号：プレミアムインプラント ZirTi/ 22600BZX00088000

※2 販売名/承認番号：プレミアムTGインプラント ZirTi/ 22600BZX00248000

2) 材質

種類	成分
チタンベース スキャン	チタン合金（Ti-6Al-4V）
F スクリュー	

【使用目的又は効果】

本品は歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具である。

**【使用方法等】

- 1) インプラントネックが再現された作業模型上の技工用アナログに、本品を適切な位置に合わせて装着、スクリュー固定する。
- 2) 本品の上に目的とした形態のワックスアップを行う。
- 3) 各種歯科用 CAD/CAM システムのスキャナーを用いて 2) の模型をスキャンする。
- 4) 保存されたスキャンデータをもとに CAD 用のソフトウェアで補綴物を設計する。

〔本品と併用する医療機器〕

- ・ 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット

**【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) 本品は模型上のみで使用し、口腔内では使用しないこと。
- 2) 補綴物の設計は、専用のアプリケーションソフトウェアを使用すること。
- 3) 技工作業を行う際は、換気設備の整った場所で作業を行うこと。
- 4) 本品は併用する歯科用 CAD/CAM システムの使用方に準じて使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- ・ 高温、多湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：大信貿易株式会社 浜寺営業所

住所：大阪府堺市西区浜寺公園町 3-231-3

製造業者：スウェーデン&マルティナ社（イタリア）

SWEDEN & MARTINA S.p.A.