

機械器具（58）整形用機械器具  
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 70757000  
XAポストアナログ


再使用禁止

**【禁忌・禁止】**

- ・再使用禁止。

**【形状・構造及び原理等】**

1) 製品形状

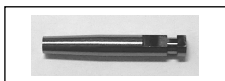

製品番号	製品名
SH-ANA-MD-F-330	XAポストアナログφ3.30
SH-ANA-MD-F-380	XAポストアナログφ3.80
SH-ANA-MD-F-425	XAポストアナログφ4.25
SH-ANABU-F-380	XAポストTSアナログφ3.80

2) 材質：チタン合金（Ti-6Al-4V）

**\*【使用目的又は効果】**

本品は歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具である。

**\*【使用方法等】**

- 1) アバットメントレベルでの印象採得後、印象体内に取り込まれた印象キャップに対応する本品を装着する。
- 2) 通法に従い石膏を注入し、作業模型を作製する。
- 3) 作業模型上の本品にアバットメントを装着し、上部構造体を作製する。

（使用方法に関連する使用上の注意）

- 1) 破損、変形などの原因となるため、必要以上の力を加えないこと。

**\*【使用上の注意】**

（重要な基本的注意）

- 1) インプラント治療を行うに当たり、包括的な患者評価と術前診断を行い、治療計画を行うこと。

**【保管方法及び有効期間等】**

〈保管方法〉

- ・高温、多湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：大信貿易株式会社 浜寺営業所

連絡先：0120-382-118

製造業者：スウェーデン&マルティナ社（イタリア）

SWEDEN & MARTINA S.p.A.