

機械器具(49) 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
一般医療機器 ガイド 37150000
S & Mガイドドサージェリー用ガイドスリーブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・本品の類似成分及び配合成分に対して過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと
- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1) 製品形状及び材質

製品番号	製品名	入数
GS-B150-PIN-6	 アソカビッドガイドスリーブ GS用 D1.50	6個
GS-B415	 ガイドスリーブ GS用 D4.15	1個
GS-B415-6		6個
GS-B550	 ガイドスリーブ GS用 D5.50	1個
GS-B550-6		6個
GS-B415-EX-6	 ガイドスリーブ EX GS用 D4.15	6個
GS-B550-EX-6	ガイドスリーブ EX GS用 D5.50	6個

2) 材質 : ステンレススチール

***【使用目的又は効果】**

本品は歯科用インプラントの外科手術に用いる。

***【使用方法等】**

1) 本品は未滅菌であるため、口腔内での使用前には必ず洗浄、消毒、滅菌を行うこと。推奨する滅菌方法は、以下のとおりである。

滅菌方法	滅菌温度	滅菌時間	乾燥時間
高圧蒸気滅菌	121℃~124℃	20分以上	15分以上

- 2) 作製したサージカルガイドの孔に、本品を挿入して設置する。
3) S & M ガイドドサージェリー用バー、S & M ガイドドサージェリー用インストゥルメントと併せて使用する。

***【使用上の注意】**

(重要な基本的注意)

- 1) 本品の使用後は、表面に付着している血液、組織等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
- 2) 破損、変形などの原因となるため、必要以上の力を加えないこと。

【保管方法及び有効期間等】

(保管方法)

- ・高温、多湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 大信貿易株式会社 浜寺営業所

連絡先 : 0120-382-118

製造業者 : スウェーデン&マルティナ社 (イタリア)

SWEDEN & MARTINA S.p.A.