

機械器具（58）整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 70757000
ダイナミック アナログ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

1) 製品形状

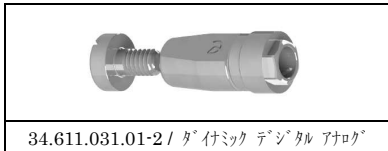

2) 材質

ステンレススチール

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具である。

【使用方法等】

- 1) 専用ソフトを用いて歯科用模型を製作する。
- 2) 歯科用模型に設けられた取り付け穴に、固定用パーツを外した本品を咬合面側から挿入する。
- 3) 反対面より固定用パーツを本品のネジ部に装着し、ドライバー等を用いて回転させ歯科用模型に固定する。

【使用上の注意】

（重要な基本的注意）

- 1) 技工作業を行う際は、換気設備の整った場所で作業を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- ・高温、多湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：大信貿易株式会社 浜寺営業所

連絡先：0120-382-118

製造業者：タラディウム エスパーニャ社（スペイン）

TALLADIUM ESPAÑA, S.L.,