

歯科材料 7 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用パラフィンワックス（70893000）

ジーシー バイトワックス

【形状・構造及び原理等】

形 状：板状
色 調：ピンク、グリーン
主成分：パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックス、
蜜蝋、ダンマー、カルナウバワックス
原 理：ワックスに義歯等を圧接して変形させることにより、
咬合印象を採得する。

【使用目的又は効果】

主として、義歯床の仮床、人工歯の排列等に用いるワックスとして使用する。

【使用方法等】

- 1) 通常、2 cm 幅程度に切断し、片側の咬合印象を採り、その状態を視察し調整します。この際、ワックスを下顎片側歯列上に置き、軽く歯列両側に圧接しておけば、概略の位置を知ることができ、ワックスの移動を防ぐことができます。
- 2) 中心位咬合時における全顎の咬合状態を観察する場合は、一枚のワックスを半分に切断し、適宜な形に調整してから用います。

【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
 - ①本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
 - ②使用場所には、消火器を備えること。
 - ③本品は【使用目的又は効果】に記載の用途以外に使用しないこと。
 - ④本品は、歯科有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・室温で保管する。
- ・本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光のあたる場所）に放置しない。
- ・保管場所には消火器を備える。
- ・本品は火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に多量に保管しない。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように、適切に保管・管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：大成歯科工業株式会社

発売元：株式会社ジーシー
住所：〒113-0033
東京都文京区本郷3丁目2番14号
電話番号：（お客様窓口）0120-416480