

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス (16189000)
ジーシー レディーキャスティングワックス

【形状・構造及び原理等】

主成分：パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックス、
蜜蝋、ダンマー

形 状： 単位 mm

番号	形状	幅径 (直径)	高さ	長さ
R05	●	0.5		200
R07	●	0.7		
R10	●	1.0		
R15	●	1.5		
R20	●	2.0		
R25	●	2.5		
R32	●	3.2		
R40	●	4.0		
R50	●	5.0		
R60	●	6.0		
R80	●	8.0		
R100	●	10.0		
HR14	▲	1.4	1.1	
HR19	▲	1.9	1.0	
HR22	▲	2.2	1.2	
HR28	▲	2.8	1.1	
T17	▲	一辺 1.7		1.0
P40	■	4.0	1.0	
L31	■	3.1	1.4	

原 理： 鋳造時に焼却して空洞に金属を封入し、歯科鋳造体を作製する。又は、流し込みレジンのスプルーとして植立し、脱蠟後の空洞にレジンを封入し、義歯を作製する。

【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製のキャスティングワックス

【使用方法等】

- 1) レディーキャスティングワックスは、各種クラスプ、バー、及び床の付線などのろう型の作製や、スプルー線、ベントなどに使用します。
- 2) 室温でも充分使用可能ですが、微温湯又は弱い火炎で軟化すれば、複雑な形状の原型も自由に作製できます。

【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
 - ①本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
 - ②使用場所には消火器を備えること。
 - ③本品は【使用目的又は効果】に記載の用途以外に使用しないこと。
 - ④本品は、歯科有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・室温で保管する。
- ・本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光のあたる場所）に放置しない。
- ・保管場所には消火器を備える。
- ・本品は火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に多量に保管しない。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように、適切に保管・管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：大成歯科工業株式会社

発売元：株式会社ジーシー

住所：〒113-0033
東京都文京区本郷3丁目2番14号

電話番号：（お客様窓口）0120-416480