

歯科材料 7 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャストイングワックス (16189000)
ジーシー インレーワックス ソフト

【形状・構造及び原理等】

形状

- ・棒状、固形缶入り：40g／缶
60 本／函
- 色調 3 色：グレー、レッド、バイオレット

主成分

- ・パラフィンワックス、カルナバワックス、ダンマー

原理

- ・彫刻してワックスパターンを作成する。

特性

凝固点		57.0℃
加圧短縮率	30℃	0.5%
	40℃	75.4%
	45℃	87.1%
熱膨張率(25→37℃)		0.45%

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：大成歯科工業株式会社

発売元：株式会社ジーシー

住所：〒113-0033
東京都文京区本郷3丁目2番14号

電話番号：（お客様窓口）0120-416480

【使用目的又は効果】

インレー及びクラウンなどの鑄造用ろう型を作製する。

【使用方法等】

- 1) 模型材の表面に、ジーシーセップ、シュアセップなどのワックス分離材を塗布します。
- 2) 盛り上げ法の場合は、ジーシーワックスインストルメントなどを用いて、少量ずつ適温に溶かしたワックスを盛り上げていきます。
- 3) 圧接法の場合は、棒状のワックスを炎で加熱し、適度に軟化させたところで圧接していきます。
- 4) カービング・埋没は、通法に従い作業します。

【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
 - ①本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
 - ②使用場所には消火器を備えること。
 - ③他の製品と混用しないこと。
 - ④本品は【使用目的又は効果】に記載の用途以外に使用しないこと。
 - ⑤本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 2) その他の注意
 - ①グレー色は遮光性の成分が加えられており、同じ硬さの製品でも他の色と操作感が異なるので、注意すること。
 - ②同じ名称の色調であっても、違う硬さの製品では多少色が異なるので、注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本品は、室温で保管する。
- ・本品を、高温となる場所（ストーブの側、直射日光のあたる場所）に放置しない。
- ・保管場所には消火器を備える。
- ・本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に多量に保管しない。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように、適切に保管・管理する。