

歯科材料 7 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャストイングワックス(16189000)

ジーシー クラウンワックス

【形状・構造及び原理等】

形状 : 固形缶入り

主成分 : パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックス、
カルナウバワックス、ダンマー

原理 : 彫刻してワックスパターンを作製する。

【使用目的又は効果】

インレー及びクラウンなどの鑄造用ろう型を作製する。

【使用方法等】

- 1) 模型材の表面にジーシーセップ、シユアセップなどのワックス分離材を塗布します。
- 2) ジーシーワックスインストルメントなどを用いて、少量ずつ適温に溶かしたワックスを盛り上げるか、ディッピング法により均一な層を形成し、その上に他のインレーワックスを盛り上げていきます。
- 3) カービング・埋没は通法に従い作業を行います。

【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
 - ①本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
 - ②使用場所には、消火器を備えること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・室温で保管する。
- ・本品を高温となる場所(ストーブの側、直射日光のあたる場所)に放置しない。
- ・保管場所には消火器を備える。
- ・本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に多量に保管しない。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように、適切に保管・管理する。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 : 大成歯科工業株式会社

発売元 : 株式会社ジーシー

住所 : 〒113-0033

東京都文京区本郷3丁目2番14号

電話番号 : (お客様窓口) 0120-416480