

歯科材料7 歯科用ワックス  
一般医療機器 歯科用キャストイングワックス（16189000）  
**ジーシー インレーワックス マージン**

**【形状・構造及び原理等】**

形状：固形缶入り

主成分：パラフィンワックス、蜜蝋、ダンマー、  
カルナバワックス

原理：彫刻してワックスパターンを作成する。

**【使用目的又は効果】**

インレー及びクラウンなどの鑄造用ろう型を作製する。

**【使用方法等】**

- 1) カービング作業までは通法に従い作業を行います。
- 2) ワックスパターンのマージン部を全周切り取り、インレーワックスマージンに置き換えます。ジーシーワックスインストルメントなどを用いて、少量ずつ適温に溶かしたワックスを盛り上げていきます。
- 3) 埋没は通法に従い作業を行います。  
※インレーワックスマージンを内面に使う場合は、盛り上げ法あるいはディッピング法を用いて、模型材の表面に均一な層になるようにコーティングしてから、他のワックスを盛り上げてゆきます。

**【使用上の注意】**

- 1) 重要な基本的注意
  - ①本品の使用により、発疹、皮膚炎等の過敏症状を起こした術者においては、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
  - ②本品に対して、発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。
  - ③本品は、目に入らないように注意すること・万一目に入ったときは、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。
  - ④本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
  - ⑤使用場所には消火器を備えること。

**【保管方法及び有効期間等】**

[保管方法]

- ・本品は室温で保管する。
- ・本品を高湿となる場所（ストーブの側、直射日光のあたる場所）に放置しない。
- ・保管場所には消火器を備える。
- ・本品は火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に多量に保管しない。
- ・本品は歯科の従事者以外が触れないように、適切に保管・管理する。

**【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：大成歯科工業株式会社

発売元：株式会社ジーシー  
住所：〒113-0033  
東京都文京区本郷3丁目2番14号  
電話番号：（お客様窓口）0120-416480