

歯科材料 7 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャストイングワックス（16189000）

ジーシー キュービックワックス

【形状・構造及び原理等】

形 状：ブロック状

主成分：パラフィンワックス、カルナウバワックス、ダンマー

原 理：彫刻してワックスパターンを作成する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：大成歯科工業株式会社

発売元：株式会社ジーシー

住所：〒113-0033

東京都文京区本郷3丁目2番14号

電話番号：（お客様窓口）0120-416480

【使用目的又は効果】

インレー及びクラウンなどの鑄造用ろう型を作製する。

【使用方法等】

1) 鑄造用鑄型・試適用ワックスクラウンの製作

①模型材の表面に、シユアセップなどのワックス分離材を塗布します。

②盛り上げ法の場合は、ジーシー ワックスインストルメントなどを用いて、少量ずつ適温に溶かしたワックスを盛り上げていきます。

③カービング・埋没は、通法に従い作業を行います。

2) 診断用ワックスアップ

①模型上の歯牙、歯列に盛り上げカービングを行い、術後の形態を予測・診断します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

1) 過熱による火傷に注意すること。

【使用上の注意】

1) 重要な基本注意

①口腔内にて診断用として使用した場合は、血液・唾液などを充分洗浄後、必要に応じて消毒を行うこと。

②本品は、目に入らないように注意すること。万一目に入ったときは、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。

③本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。

④本品は紫外線の影響で退色するので、直射日光のあたる場所や蛍光灯の直下の場所に置かないようにし、使用后すぐにフタ等をして遮光すること。

⑤ワックスアップした本品は、紫外線の影響で、直射日光のあたる場所や蛍光灯の直下の場所に長時間放置すると退色するので、注意すること。

⑥使用場所には消火器を備えること。

⑦本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・室温で保管する。
- ・本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光のあたる場所）に放置しない。
- ・保管場所には消火器を備える。
- ・本品は火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に多量に保管しない。
- ・本品を長期間使用しない場合は、フタ等をして遮光する。
- ・本品は歯科の従事者以外が触れないように、適切に保管・管理する。