

歯科材料 7 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス (16189000)
ジーシー インレーワックス S - RED

【形状・構造及び原理等】

形状 : 棒状

主成分 : パラフィンワックス、モンタンワックス、ダンマー

原理 : 彫刻してワックスパターンを作製する。

【使用目的又は効果】

インレー及びクラウンなどの鑄造用ろう型を作製する。

【使用方法等】

- 1) 模型材の表面に、ジーシーセップ、シュアセップなどのワックス分離材を塗布します。
- 2) 棒状のワックスを炎で加熱し、適度に軟化させたところで圧接していきます。
- 3) カービング・埋没は通法に従い作業を行います。

【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
 - ①本品の使用により、発疹、皮膚炎等の過敏症状を起こした術者においては、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
 - ②本品に対して、発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。
 - ③本品は、目に入らないように注意すること・万一目に入ったときは、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。
 - ④本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
 - ⑤使用場所には消火器を備えること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・室温で保管する。
- ・本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光のあたる場所）に放置しない。
- ・保管場所には消火器を備える。
- ・本品は火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に多量に保管しない。
- ・本品は歯科の従事者以外が触れないように、適切に保管・管理する。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 : 大成歯科工業株式会社

発売元 : 株式会社ジーシー

住所 : 〒113-0033

東京都文京区本郷 3 丁目 2 番 14 号

電話番号 : (お客様窓口) 0120-416480