

歯科材料 8 歯科用石こう及び石こう製品
一般医療機器 歯科用硬質石こう（70897020）
オルソリー ブランストーン

【形状・構造及び原理等】

形状 : 粉末
主成分 : 石こう
原理 : 半水石こうの水和反応により硬化し模型を作製する

【使用目的又は効果】

歯科技工物を製作するための模型材等として使用する

【使用方法等】

- 1) 標準混水量は、本品粉末 100 g に対し水 25mL です。
- 2) 手練和は、ラバーボール等に水、粉の順に入れ、スパチュラ等で 30～60 秒間、むらなく均一に行います。
減圧機械練和では練和カップ等に水、粉の順に入れ、水、粉をよく馴染ませてから 30～60 秒間、機械練和します。
遠心練和では練和カップ等に水、粉の順に入れ、使用する器機の指示に従って、機械練和します。
- 3) 印象に注入します。この際、バイブレーターを用いますと気泡の少ない模型が得られます。
- 4) 印象に注入後、アルジネート印象材では約 40 分後、ポリサルファイドラバー印象材やシリコンラバー印象材では約 60 分後に模型を取り出します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 本材とりん酸塩系埋没材を混用すると、双方の硬化時間が遅延することがあるので、練和の際は専用の練和容器を使用すること。
- 2) 本材に塩類などが混入すると硬化時間が変化するので混入させないように注意すること。
- 3) アルミバック開封後は吸湿しないように保管すること。
- 4) 本材を扱う際（硬化体を研削する場合も含む。）には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- 5) 本材の研削、研磨の際には、眼を傷つけないように、保護メガネなどを使用すること。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意（次の患者には慎重に適用すること。）
①薬剤、食品、アクセサリ、化学物質等に過敏症の既往歴がある患者には、本品及び類似品に対して過敏症歴がなくても問診を行い、慎重に適用すること。
- 2) 重要な基本的注意
①本品の使用により、発疹、皮膚炎等の過敏症状を起こした患者/術者においては、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせる/受けること。
②本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
③本品は、目に入らないように注意すること。万一目に入ったときは、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。
④本品の誤飲には充分注意すること。[製品の誤飲が人体に影響する可能性がある]
⑤本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
⑥本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】**〔保管方法〕**

- ・室温の乾燥した場所に保管する。
- ・直射日光の当たらない場所に保管する。

〔有効期限〕

本材は、包装に記載の使用期限までに使用すること。

※（例 EXP. 2018-06 は

使用期限 2018 年 6 月 を示す。）

〔記載の使用期限は自己認証（当社データ）による。〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 : 大成歯科工業株式会社

発売元 : 株式会社ジーシーオルソリー
住所 : 東京都板橋区蓮沼町 76 番 1 号
電話番号 : (お客様窓口) 0120-108-171