

機械器具 75 脱疾治療用具
一般医療機器 脱疾治療用ストラップ 30883000

タイヨー脱腸帯

【禁忌・禁止】

天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある人への使用は禁止。



【形状・構造及び原理等】

ゴムの弾性を利用し、脱疾部を押さえる。

【使用目的、効能又は効果】

腹部の脱疾を正常な位置に保持するために押さえる。
小児用から大人用サイズがある。

【品目仕様等】

・外観

ゴム部分、金具部分を点検し、表面は滑らかで汚れや、シミ、キズ、凸凹があつてはならない。
全品目視にて行う。

・寸法

ゴム部分、金具部分の誤差は規格寸法の許容範囲内であること。
通常目視で行い、必要があればノギスにて測定する。

【操作方法又は使用方法等】

仰向けに寝た姿勢で脱腸を腹部の方へ静かに揉み入れ、三角ゴム押圧球でフタをするように押し当て、腰帯を腰回りの寸法に調節し背中から左腰骨(左側脱腸の場合は右腰骨)の上より押圧球上部三ッ羽根金具に引っ掛ける。
股帯を右側腰の位置より股間を通して適當の寸法に調節し、三ッ羽根金具下部の引っ掛けに掛け固定させる。

【使用上の注意】

天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがある。

このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。

シンナーや市販の洗浄液、直射日光は避けること。
幼小児及び皮膚の弱い方はガーゼ又はホータイを巻いて使用すること。

症状の改善がみられないときには医師に相談すること。

使用しない場合はベビーパウダー等でまぶしてから冷暗所に保管すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

直射日光、高温、多湿を避け冷暗所で保管すること。

【包装】

・ 1ヶ入り

【添付文書及び文献請求先】

株式会社太陽医療品製作所

TEL. 03-6383-5701

FAX. 03-6383-5702

【製造販売業者の名称及び住所等】

第三種製造販売業者

株式会社太陽医療品製作所

〒167-0051 東京都杉並区荻窪 5-16-7 1 階

TEL. 03-6383-5701